




MỘT PHẦN TẤT YẾU CHO CUỘC SỐNG


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ghế massage không trọng lực
OR - 180 / OR - 180i

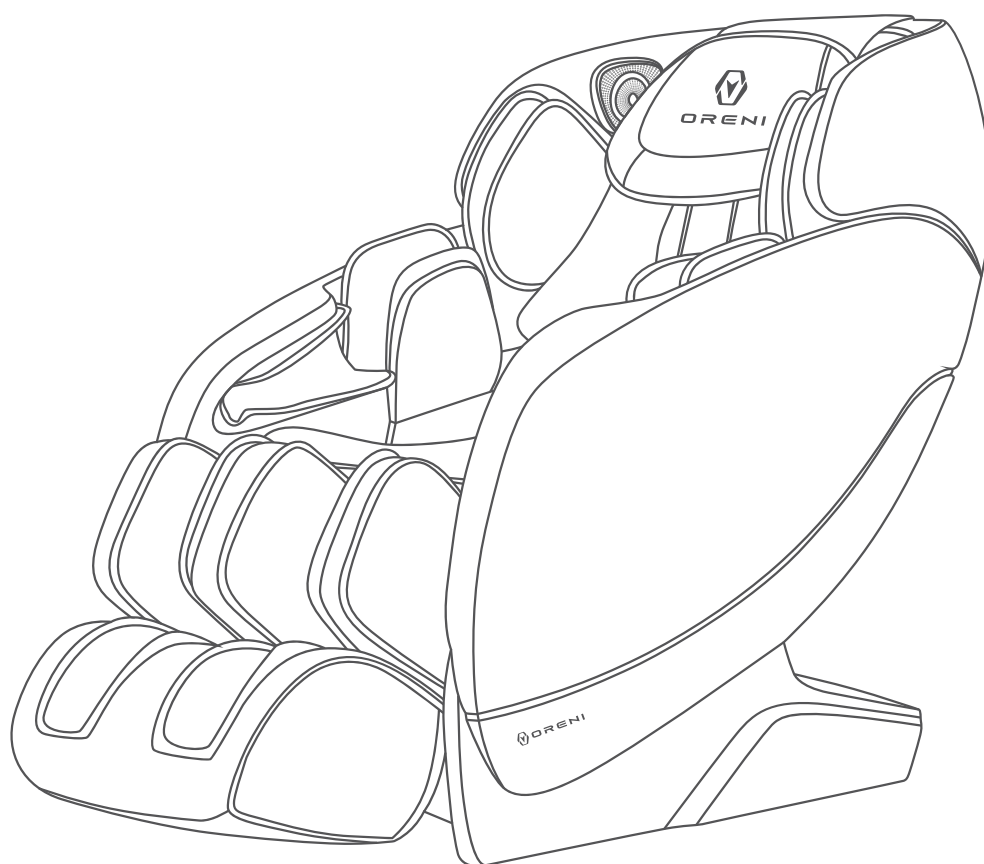


ORENI VIỆT NAM

Công ty chúng tôi sẽ có những cải tiến sản phẩm và sẽ thông tin chi tiết các thay đổi nếu có. Sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Về ngoài của sản phẩm dựa trên thay đổi các thiết kế.

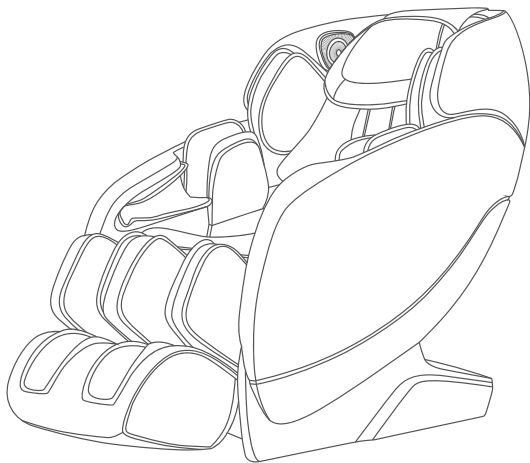

OR-180

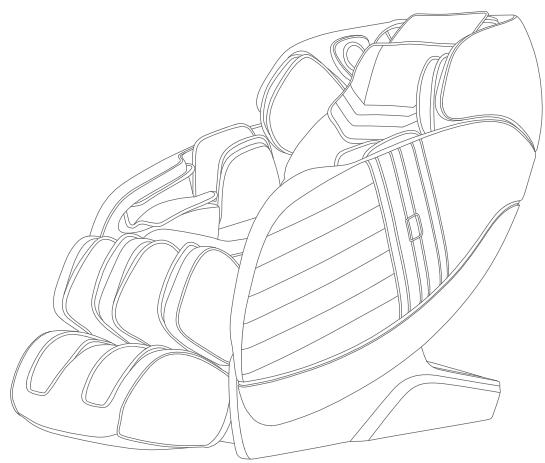

OR-180i

Cảm ơn quý khách đã mua ghế massage do công ty chúng tôi sản xuất.

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng để sử dụng ghế an toàn và đúng cách. Sau khi đọc xong, hãy cất ở nơi có thể đọc lại dễ dàng bất cứ lúc nào.

DANH MỤC

Những cảnh báo an toàn quan trọng	1
Những lỗi dễ gặp phải cần tránh	7
Tên các bộ phận ghế	9
Chức năng	10
Trước mỗi lần massage	12
Bắt đầu massage	13
Bảng điều khiển	14
Thao tác trên bảng điều khiển	16
Chế độ điều khiển giọng nói	19
Các hướng dẫn khác	20
Hướng dẫn lắp đặt	21
Đặt ghế và di chuyển ghế	22
Vệ sinh và bảo quản	23
Những vấn đề có thể gặp phải	25
Bảo trì và bảo hành	26
Điều kiện bảo hành	27

NHỮNG CẢNH BÁO AN TOÀN QUAN TRỌNG

Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ lưu ý an toàn này và sử dụng đúng cách.

Các biện pháp phòng ngừa được nêu ra với mục đích nhắc nhở bạn sử dụng sản phẩm này đúng cách để tránh sự cố ngoài mong muốn, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài sản.



Cảnh báo:

Nếu sử dụng không đúng cách, người dùng có thể gặp chấn thương không mong muốn, tổn hại đến vật dụng, tài sản xung quanh hiện có.

Ghế massage có chức năng làm ấm nóng nên cần cẩn trọng khi dùng.

GIẢI NGHĨA CÁC BIỂU TƯỢNG

	 Cảnh báo hoặc Chú ý (Ví dụ bên trái hiển thị các cảnh báo và lưu ý chung)
	 Hành vi bị cấm (Ví dụ bên trái thể hiện cấm tháo rời)
	 Chỉ dẫn nội dung bắt buộc và hướng dẫn (Ví dụ bên trái cho thấy việc rút phích cắm)



Những trường hợp sau đây phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng:

- ◆ Bệnh nhân ung thư
- ◆ Phụ nữ mang thai hoặc trong thời kỳ kinh nguyệt
- ◆ Người bị sốt cao
- ◆ Bệnh nhân bị bệnh cấp tính (đang trong tình trạng đau đớn)
- ◆ Bệnh nhân bị bệnh loãng xương
- ◆ Bệnh nhân bị rối loạn tri giác
- ◆ Người bị bệnh tim mạch
- ◆ Người bị bệnh thiếu máu
- ◆ Người sử dụng thiết bị tạo nhịp tim (trợ tim) hoặc các thiết bị cấy ghép vào cơ thể
- ◆ Người bị dị dạng, có bất thường hoặc cong vẹo cột sống
- ◆ Người đang điều trị hoặc cảm thấy bất thường về thể chất
- ◆ Người đang điều trị hoặc bị tổn thương trước đó các bộ phận trên cơ thể
- ◆ Người bị rối loạn tuần hoàn máu bàn chân
- ◆ Người khiếm thị

 LƯU Ý



Rút nguồn điện ngay lập tức khi sản phẩm không thể hoạt động hoặc sự cố bất thường và liên hệ bộ phận bảo hành kiểm tra, sửa chữa để tránh điện giật, rò rỉ, đoản mạch và cháy nổ.

Khi xoa bóp quanh cổ, chú ý đến chuyển động của con lăn massage và không nên để chế độ xoa bóp quá mạnh. Điều này có thể khiến bạn bị đau, thậm chí chấn thương.

Khi nâng / hạ lưng ghế và chỗ để chân, vui lòng đảm bảo rằng không có người, đồ vật hoặc vật nuôi ở phía trước và dưới chỗ để chân để tránh sự cố xảy ra.

Trước khi sử dụng, kiểm tra lớp da ghế đảm bảo không bị hư hại dẫn đến bị thương hoặc điện giật do rò rỉ (nếu bị hỏng, ngừng sử dụng ngay lập tức, rút nguồn điện và yêu cầu sửa chữa).

Trước khi sử dụng, đảm bảo rằng bạn không đeo bất kỳ phụ kiện nào (vòng tay, đồng hồ...) để tránh bị thương.

Chỉ nên massage trong khoảng 15-20 phút, 1 ngày không quá 2 lần, một bộ phận cơ thể trong vòng 5 phút. Xoa bóp liên tục trong thời gian quá dài có thể gây đau cơ và dây thần kinh.

Nếu bạn cảm thấy bất kỳ bất thường nào trong quá trình massage, vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức.

Sau khi sử dụng, vui lòng tắt công tắc nguồn để đề phòng tai nạn do trẻ em nghịch phá.

Đặt ghế massage trên mặt sàn nằm ngang, tránh đặt chỗ sàn bị nghiêng hoặc gồ ghề không bằng phẳng.

	Không nên kéo dây cáp điều khiển quá căng để tránh tai nạn hoặc thương tích.
	Vui lòng kiểm tra vị trí của con lăn massage trước khi sử dụng để tránh tai nạn hoặc thương tích.
	Di chuyển ghế ổn định để tránh trầy xước bề mặt.
	Không sử dụng nguồn điện vượt quy chuẩn của ghế dẫn tới nguy cơ bị điện giật hoặc phát ra tia lửa điện.
	Nếu dây điện hoặc phích cắm bị hỏng, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức để tránh điện giật, đoản mạch và tia lửa điện.
	Không làm hỏng, tái chế, bẻ cong, kéo căng, xoắn, dính hoặc thắt chặt dây nguồn. Ngoài ra, không để dây điện dưới các vật nặng, đặc biệt không làm vướng hoặc kẹp dây trong quá trình di chuyển. Dây nguồn hỏng có nguy cơ bị điện giật hoặc phát ra tia lửa điện.
	Không cho trẻ em sử dụng một mình và đặt ghế tránh xa trẻ nhỏ.
	Không cho trẻ em chơi trên ghế để tránh bị thương hoặc hỏng hóc.
	Không sử dụng thiết bị trị liệu khác trong khi sử dụng ghế massage này.
	Không ngủ gật trong khi xoa bóp vì xoa bóp vô thức có thể gây thương tích hoặc khó chịu khi tỉnh dậy.
	Không sử dụng ghế cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài massage để tránh hỏng hóc hoặc tai nạn.


	Đảm bảo cắm hết phích cắm và đảm bảo không có chân cắm hoặc phích cắm bị kẹt bởi vật thể lạ nguy cơ gây ra điện giật, đoản mạch và hỏa hoạn.
	Không sử dụng gần ngọn lửa trần, chẳng hạn như bếp lò. Không sử dụng khi đang hút thuốc. Không sử dụng trên các thiết bị sưởi ấm, chẳng hạn như chăn điện, vì nó có thể gây ra hỏa hoạn.
	Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan, thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi có người hướng dẫn an toàn và được giám sát trong khi sử dụng thiết bị. Trẻ em phải được người lớn giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị gây lỗi sản phẩm hay bị chấn thương.
	Không kéo da quá mạnh. Không dùng lực hoặc vật sắc nhọn chọc thủng da để tránh bị thương và hồng hóc.
	Không lau bằng xăng, dung dịch pha loãng,... Không xịt thuốc diệt côn trùng để tránh chập điện, phát tia lửa điện.
	Không ngồi trên tựa lưng, tay vịn hoặc gác chân để tránh bị thương hoặc gây hư hại ghế.
	Không di chuyển bánh xe hoặc kéo ghế trên bề mặt dễ bị trầy xước, hư hại sàn (như sàn gỗ hoặc thảm).
	Không làm rơi ghế hoặc va đập với lực mạnh để tránh bị thương hoặc hư hỏng ghế.
	Không sử dụng ghế ngay sau khi ăn để tránh cảm giác khó chịu.

	Không di chuyển ghế khi có người đang sử dụng để tránh bị thương hoặc gây hư hại ghế.
	Chỉ 01 người sử dụng ghế tại một thời điểm.
	Không kẹp tay và chân vào giữa các con lăn massage để tránh bị thương và khó chịu.
	Không sử dụng ghế khi đeo các vật cứng, chẳng hạn như phụ kiện tóc, vòng tay...
	Không để đầu và tay của bạn dưới chỗ để chân và dưới ghế để tránh tai nạn hoặc thương tích.
	Trong trường hợp mất điện, vui lòng tắt ngay công tắc nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm để tránh tai nạn khi có điện trở lại.
	Khi rút phích cắm, vui lòng giữ phần phích cắm ở phần nhựa và không kéo dây nguồn, tránh nguy cơ bị điện giật hoặc đứt mạch, đứt dây, có thể gây cháy.
	Khi không sử dụng thời gian dài, vui lòng rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm, che phủ cẩn thận vì bụi và hơi ẩm sẽ làm giảm tuổi thọ của ghế.
	Khi tiến hành bảo trì, vui lòng rút phích cắm ra khỏi ổ cắm. Ngoài ra, không cắm hoặc tháo phích cắm khi tay ướt vì có thể gây điện giật và thương tích.
	Không đặt ở nơi ẩm ướt như phòng tắm vì có thể gây chập điện, cháy nổ, hỏng hóc và rỉ sét.
	Ngoại trừ các kỹ thuật viên dịch vụ, không ai được tháo rời, sửa chữa hoặc chỉnh sửa ghế. Nếu cần sửa chữa thay thế hãy gọi cho nhân viên chăm sóc bảo dưỡng bảo trì nơi mua sản phẩm.

NHỮNG LỖI DỄ GẶP PHẢI CẦN TRÁNH


◆ Nâng vào phần chân của Ghế Massage

Khi vận chuyển không nên nâng phần chân của ghế massage lên, không được đè lên phần chân để tránh việc ghế massage bị đổ về phía trước sẽ làm hỏng hoặc gây thương tích cho những người xung quanh.

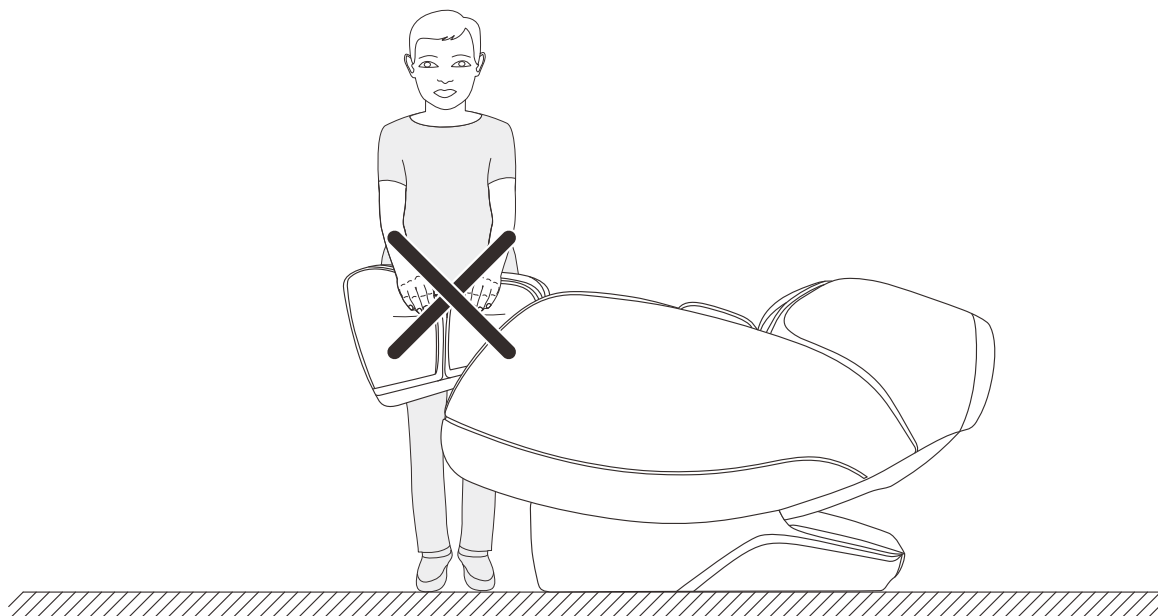

◆ Quên kiểm tra đệm ghế trước khi ngồi


Trước khi ngồi lên ghế massage, người dùng hãy đảm bảo kiểm tra đệm ghế massage đã nằm ở đúng vị trí chưa, tránh trường hợp đệm ghế bị xô dịch hoặc thiếu để gây khó chịu cho mông trong quá trình cơ thể đè xuống và mọi tổn thương cho người dùng khi sử dụng.

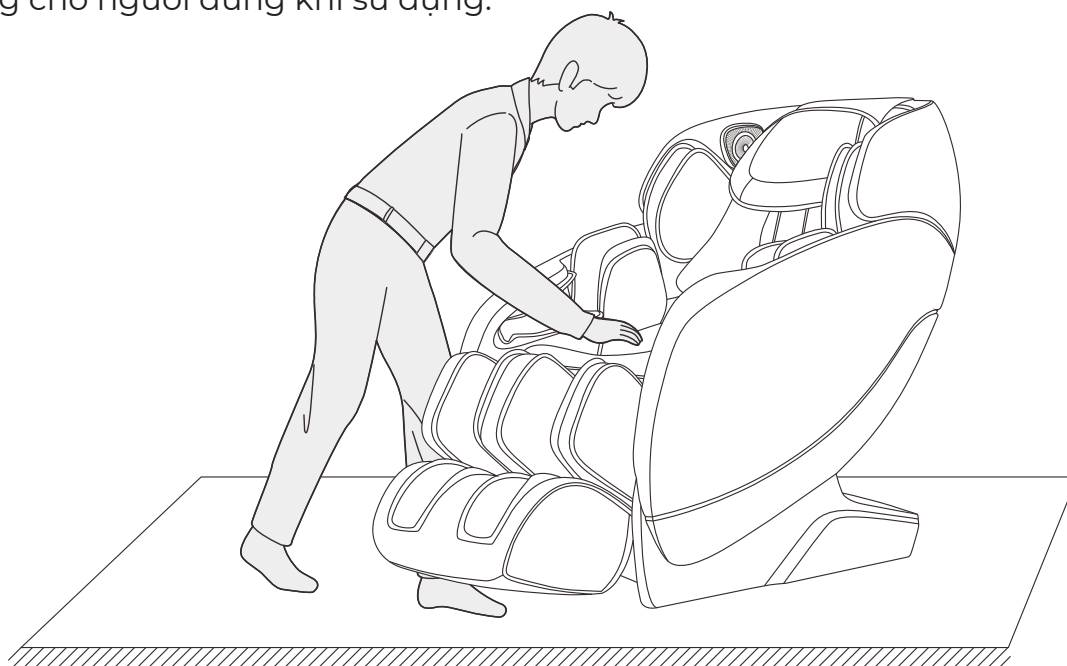

NHỮNG LỖI DỄ GẶP PHẢI CẦN TRÁNH


◆ Quên rút cáp điều khiển từ xa và dây nguồn sau khi sử dụng

Bạn nên rút cáp điều khiển từ xa, dây nguồn và cất chúng đi sau khi sử dụng ghế massage. Tránh trường hợp trẻ nhỏ đùa nghịch xung quanh ghế khi không có người giám sát sẽ có khả năng bị điện giật.

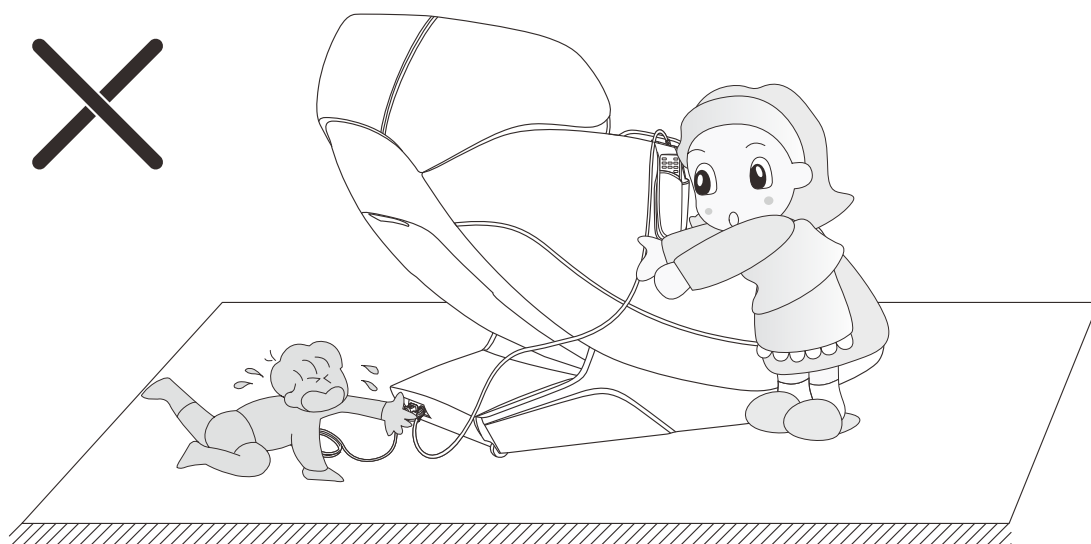


◆ Không kiểm tra kỹ xung quanh khi bật chế độ không trọng lực


Khi chức năng nằm không trọng lực được bật, hãy kiểm tra xem có trẻ em hoặc vật nuôi nào đang chơi xung quanh ghế hay không, để tránh bất kỳ tai nạn nào cho trẻ nhỏ, vật nuôi hoặc hư hỏng sản phẩm.

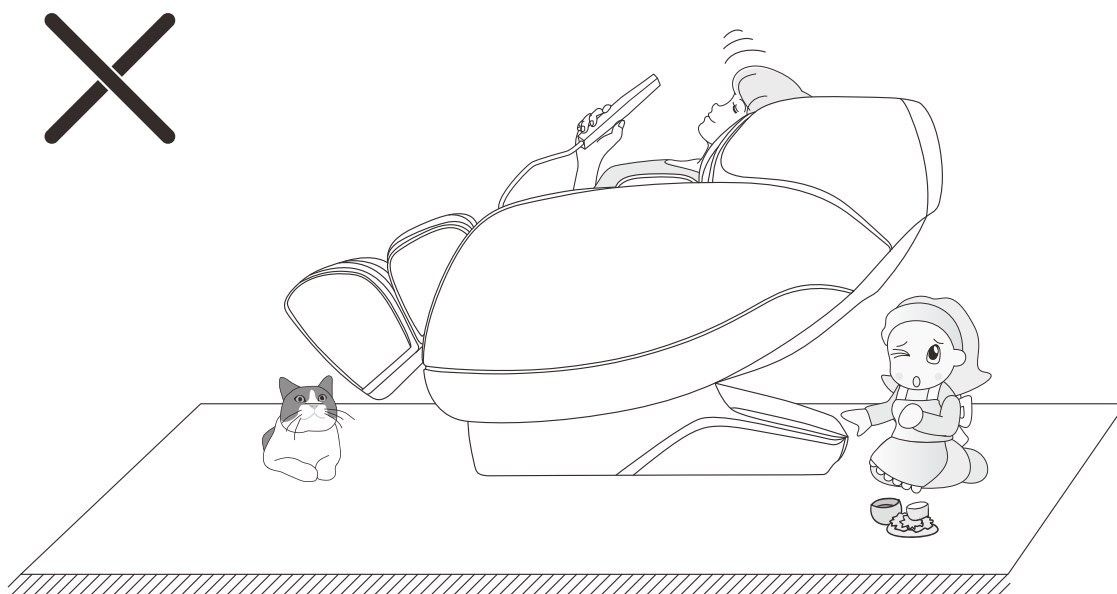

TÊN CÁC BỘ PHẬN GHẾ

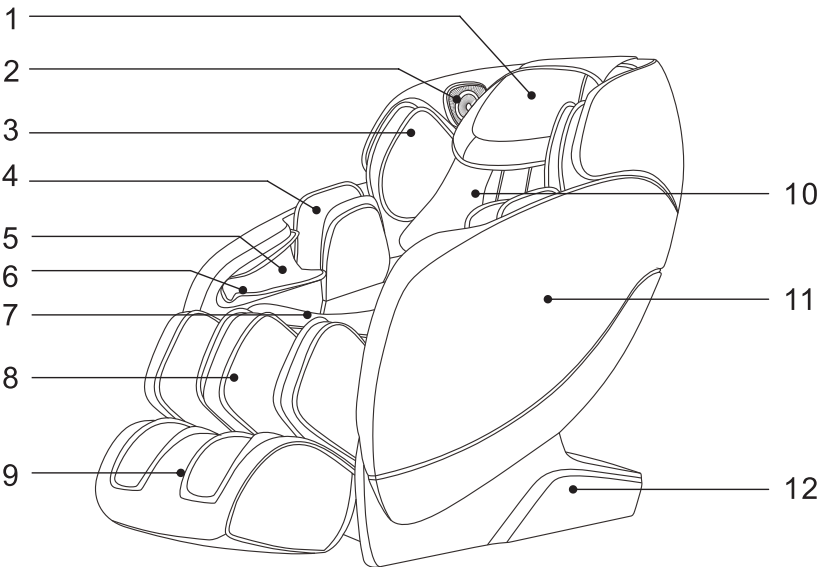

- 1. Gối đầu (đệm đầu)
- 2. Loa 3D digital (micro tính năng điều khiển bằng giọng nói tích hợp bên phải)
- 3. Túi khí tay phía trên
- 4. Túi khí bắp tay
- 5. Túi khí cánh tay
- 6. Túi khí bàn tay
- 7. Túi khí hông
- 8. Phần massage bắp chân
- 9. Phần massage cổ chân, mắt cá chân, bàn chân
- 10. Đệm lưng
- 11. Cánh hông ghế
- 12. Chân đế

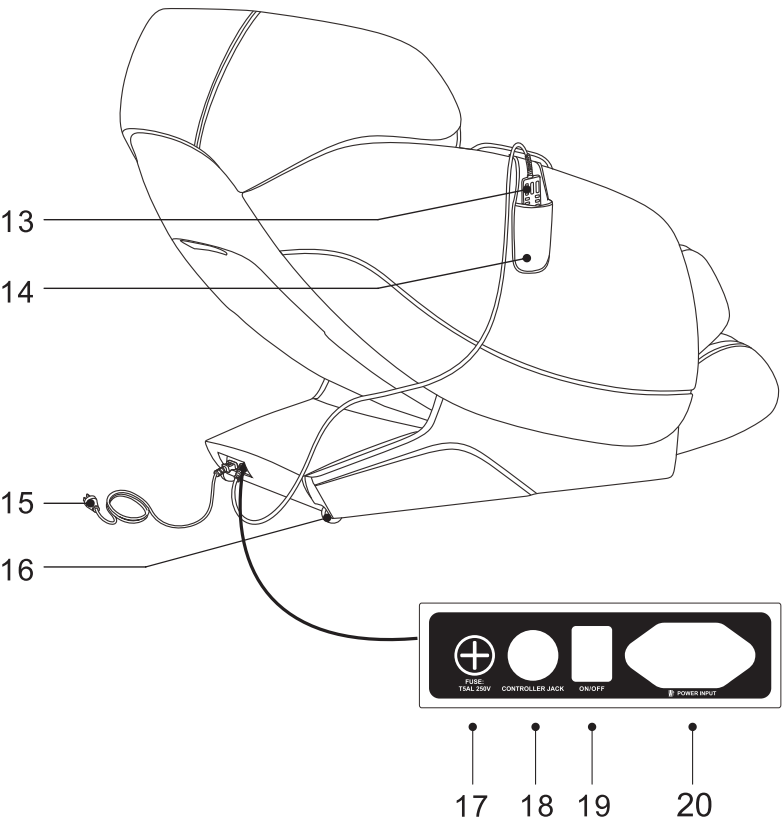

- 13. Bảng điều khiển
- 14. Túi đựng điều khiển
- 15. Dây nguồn và phích cắm
- 16. Bánh xe
- 17. Cầu trì bảo vệ
- 18. Ổ cắm bảng điều khiển
- 19. Công tắc nguồn
- 20. Ổ cắm dây nguồn

CHỨC NĂNG

- Ghế massage Oreni OR-180 được thiết kế với bảng điều khiển gắn trên ghế massage. Ghế có thể di chuyển, thay đổi vị trí cũng như hoạt động êm ái, không phát ra tiếng ồn.
- Có 5 kỹ thuật massage: **Bấm huyết chuyên sâu (Shiatsu), Đấm bóp, Vỗ, Gõ, Đấm bóp kết hợp vỗ.**
- Ghế massage này được trang bị tính năng quét cơ thể, dò tìm huyết đạo và định vị những vùng massage theo kích thước vùng cơ thể.
- Ghế được trang bị 12 chức năng massage tự động, bao gồm: **Thoải mái; Thư giãn; Kéo căng; Massage vai và cổ; Massage lưng và eo; Massage toàn thân; Massage trị liệu; Phục hồi cơ thể; Đả thông kinh mạch; Massage hông, đùi; Chế độ đi vào giấc ngủ; Massage toàn bộ túi khí.**
- Ghế được trang bị tính năng massage thủ công (tự chọn trên bảng điều khiển) cho các phần trên cơ thể: toàn thân, các điểm cố định và các bộ phận massage cục bộ. Người dùng có thể điều chỉnh tốc độ của mỗi thao tác massage với 5 mức mức độ khác nhau.
- Ở chế độ massage điểm cố định và cục bộ, người dùng có thể điều chỉnh vị trí lên xuống. Trong quá trình massage Ấn chạm, Shiatsu và Vỗ, bạn có thể điều chỉnh phạm vi massage rộng, trung bình hoặc hẹp.
- Chức năng massage túi khí có 3 khu vực massage là massage thân người, massage tay, massage chân với 3 mức cường độ nhẹ, vừa, mạnh.
- Ghế massage Oreni OR-180 được trang bị chức năng massage chân bằng con lăn.


CHỨC NĂNG

- Phần đế chân được điều chỉnh gấp phù hợp với người sử dụng với các chiều cao khác nhau.
- Sản phẩm này được trang bị chức năng hồng ngoại, tạo nhiệt sưởi ấm từ các sợi carbon giúp làm ấm cơ thể.
- Ghế massage thiết kế khung đường ray trượt phần tựa lưng, nơi đường hoạt động của hệ thống con lăn massage toàn bộ phần lưng của bạn.
- Khung đường ray trượt của ghế được thiết kế theo hình dáng đường cong của cột sống, phần lưng người nên OR-180 hoàn toàn phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng, massage cho toàn bộ cơ thể.
- Hệ thống âm thanh 3D được tích hợp bên trái và cánh tay phải giúp bạn giải trí, thư giãn bằng âm nhạc, âm thanh sống động.
- Chức năng Bluetooth thông minh của OR-180 cho phép người dùng kết nối với điện thoại để trải nghiệm âm nhạc theo sở thích cá nhân.
- Tính năng điều khiển bằng giọng nói thông minh, tiện ích. Chỉ cần 3 giây bạn đã có thể bật / tắt điều khiển bằng giọng nói (tích hợp cùng nút Không trọng lực Zero Gravity).
- Trong các túi khí phần tay có các dải massage đặc biệt với chức năng trị liệu từ trường bằng nam châm năng lượng tự nhiên dưới đế.
- Màn hình màu LCD tích hợp cùng bộ điều khiển.
- Sau khi tắt máy, ghế sẽ tự động trở về vị trí ban đầu và khi dùng tiếp cần phải thiết lập lại.

TRƯỚC MỖI LẦN MASSAGE

Kết nối với nguồn điện

1. Cắm phích cắm điện vào ổ cắm điện và ổ cắm dây nguồn phía sau máy
2. Bật công tắc nguồn

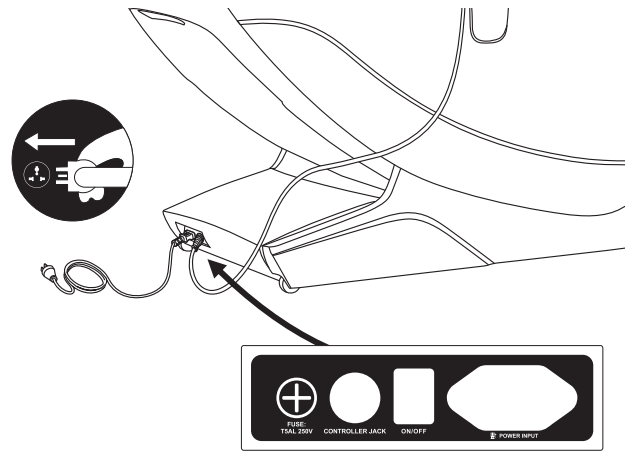

Các mục cần kiểm tra:

1. Kiểm tra môi trường xung quanh Đảm bảo không có người, vật nuôi và đồ vật xung quanh lưng ghế massage hoặc bên dưới chỗ để chân.

2. Kiểm tra tình trạng ghế massage


- ◆ Nâng miếng đệm sau, kiểm tra nắp sau và các bộ phận của ghế
- Nếu thấy có gì bất thường thì ngừng sử dụng lập tức và gọi cho bộ phận sửa chữa.
- ◆ Kiểm tra dây nguồn, dây bảng điều khiển và nguồn cắm. Đồng thời kiểm tra xem phích cắm điện có bị kẹt bởi tóc, bụi bặm, rác hay không.
- ◆ Ngồi đúng tư thế chỗ đặt lưng, chân; đảm bảo ghế ở trạng thái ban đầu, không bị nâng lên hay hạ xuống.
- ◆ Nếu thấy trạng thái ghế bị nâng lên hay hạ xuống hãy thao tác nút  (bật / tắt) để đưa ghế về vị trí ban đầu.
(*) Nhấn nút bật / tắt, tựa lưng cũng sẽ được thiết lập lại.

BẮT ĐẦU MASSAGE

1. Bắt đầu massage bằng cách nhấn nút  (bật / tắt) trên bảng điều khiển. Ghế sẽ tự động điều chỉnh tư thế và khởi động chương trình massage mặc định.

2. Chức năng định vị cơ thể của ghế sẽ tự động phát hiện vị trí trên cơ thể, định vị đường cong của lưng bạn.

3. **Điều chỉnh vị trí vai:** Nếu vị trí vai được phát hiện không chính xác, bạn có thể nhấn phím lên / xuống cho phù hợp; có 10 mức điều chỉnh. Nếu không điều chỉnh trong vòng 10 giây, chế độ massage sẽ bắt đầu thực hiện tự động.

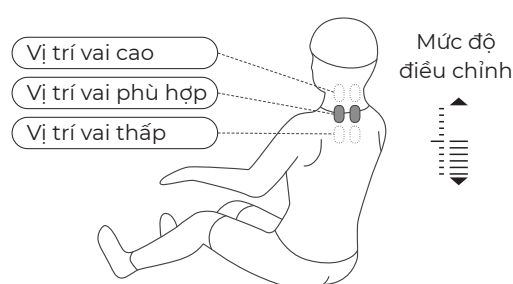


Phím	Mô tả	Hiển thị
	Di chuyển điểm định vị lên trên đến một vị trí phù hợp với vai	
	Di chuyển điểm định vị xuống dưới đến một vị trí phù hợp với vai	

Trong quá trình phát hiện vị trí điểm massage trên vai, lưng; bạn cũng có thể chọn bất kỳ một trong 12 chức năng massage tự động để được thư giãn.

Lưu ý: Khi khởi động ghế massage OR-180, bạn có thể chọn chức năng massage tự động. Nếu bạn nhiều lần chọn cùng một chức năng tự động, thì có thể bỏ qua quá trình khởi động và trải nghiệm ngay chế độ massage đó.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

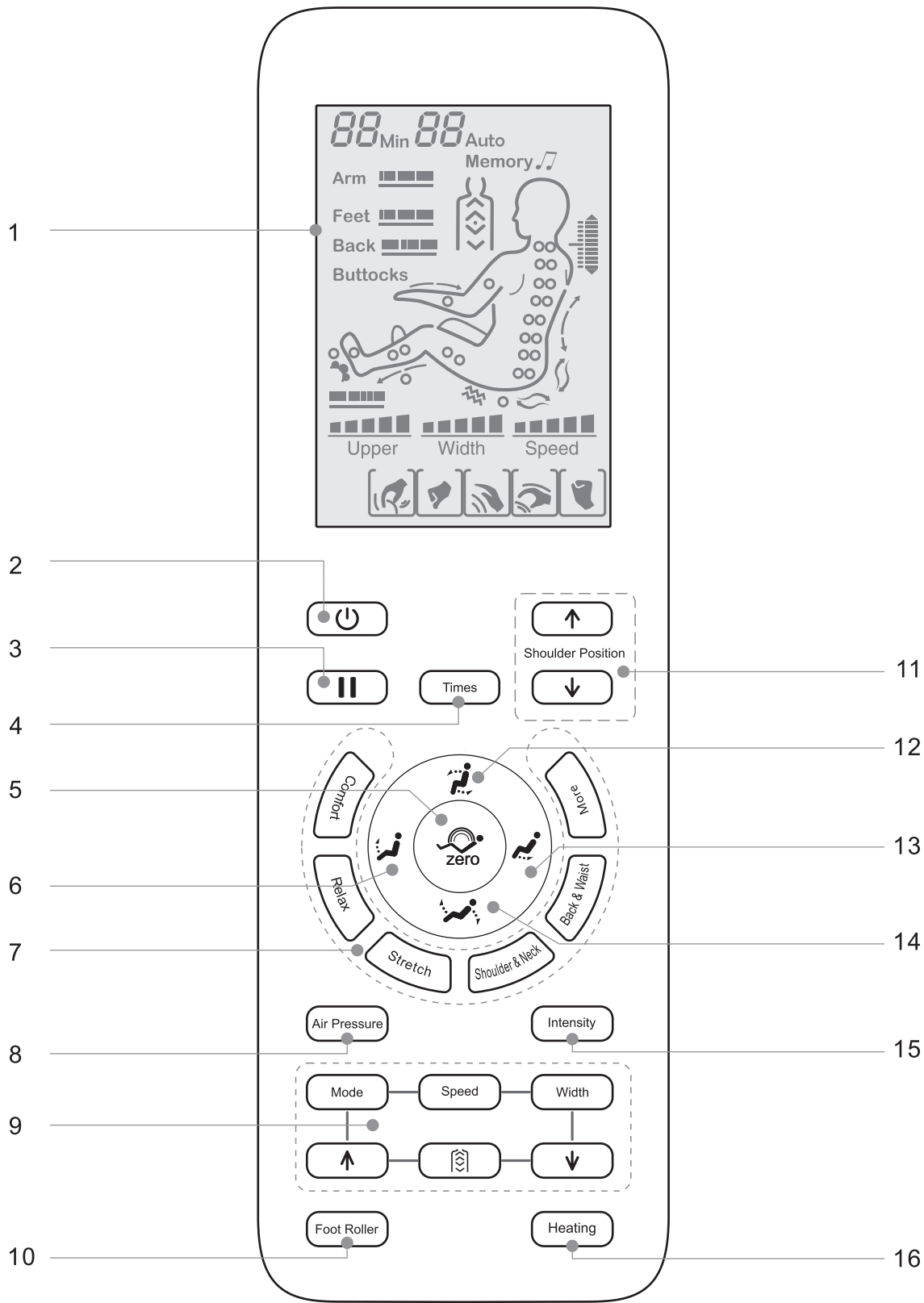

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

1. Màn hình hiển thị tất cả các chức năng massage.
2. **Bật / tắt:** Bật hoặc tắt tất cả các chức năng massage.
3. **Tạm dừng / tiếp tục:** Tạm dừng hoặc tiếp tục chạy các chức năng massage.
4. **Thời gian:** Tùy chỉnh thời gian chế độ massage.
5. **Chức năng không trọng lực (Zero Gravity):** Có ba chế độ, tự động chuyển đổi theo nhu cầu của bạn.
6. **Nâng chân lên:** Nâng phần chân ghế lên.
7. **Các phím chế độ tự động:** Có 6 phím với 5 phím chương trình tự động và 7 chương trình tự động khác ở phím More (chi tiết trang 16).
8. **Chế độ massage túi khí:** Tùy chỉnh chế độ massage túi khí (chi tiết trang 17).
9. **Các phím chế độ thủ công:** Tùy chỉnh chế độ massage bằng tay (chi tiết trang 17).
10. **Con lăn massage chân:** Tùy chỉnh chế độ massage chân (chi tiết trang 17).
11. **Các phím điều chỉnh vai:** Điều chỉnh vị trí điểm massage ở vai.
12. **Dựng ghế:** Nâng phần lưng ghế lên và hạ phần chân ghế xuống.
13. **Hạ chân xuống:** Hạ phần chân ghế xuống.
14. **Tư thế nằm:** Ngả lưng ghế ra sau và nâng phần chân ghế.
15. **Cường độ nén của túi khí:** Điều chỉnh mức độ nén bóp của túi khí.
16. **Chế độ nhiệt:** Bật / tắt chức năng nhiệt hồng ngoại.

THAO TÁC TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

◆ Chế độ tự động

Tính năng	Phím	Mô tả	Hiển thị
Massage tự động		Thoải mái: Trải nghiệm massage thoải mái nhất	F1 Auto
		Thư giãn: Massage sâu nhẹ nhàng và thoải mái giúp giảm mệt mỏi và thư giãn cơ thể	F2 Auto
		Kéo căng: kết hợp thay đổi tư thế lưng, chân với hệ thống con lăn và hệ thống túi khí giúp cơ thể co duỗi thoải mái	F3 Auto
		Massage vai và cổ: Tập trung vào massage vùng vai và cổ	F4 Auto
		Massage lưng và eo: Tập trung vào massage vùng lưng và eo	F5 Auto
		Massage toàn thân: Massage chuyên sâu cho toàn bộ cơ thể	A1 Auto
		Massage trị liệu: Tập trung xoa bóp trị liệu cho thần kinh cột sống, giúp thư giãn cơ thể và tinh thần	A2 Auto
		Phục hồi cơ thể: Kích thích và phục hồi các bộ phận liên quan đến chức năng vận động, thư giãn, cải thiện tuần hoàn máu, giảm mệt mỏi, đau nhức cho phần lưng và tay chân	A3 Auto
		Đả thông kinh mạch: Kích thích sự lưu thông khí huyết và làm các cơ, khớp được thư giãn; cải thiện tuần hoàn, thông kinh mạch, tăng cường khả năng miễn dịch	A4 Auto
		Massage mông, đùi: hiệu quả cho vùng mông và đùi, giảm tích tụ mỡ thừa, làm săn chắc và thon gọn	A5 Auto
		Chế độ đi vào giấc ngủ: Tập trung vào xoa bóp 12 huyết đạo chính giúp cơ thể điều chỉnh cân bằng, nhanh chóng cải thiện giấc	A6 Auto
		Massage toàn bộ túi khí: Sử dụng toàn bộ hệ thống túi khí massage toàn thân giúp cơ thể thư giãn hoàn toàn, kích thích lưu thông máu, tăng khả năng hô hấp đẩy lùi căng thẳng mệt mỏi	A7 Auto

THAO TÁC TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

◆ Chế độ thủ công (massage cho phần trên cơ thể)

Tính năng	Phím	Điều chỉnh bi massage		Hiển thị
Các chế độ	Mode	Bấm huyết chuyên sâu (Shiatsu): tốc độ, độ rộng		
		Đấm bóp: tốc độ, độ rộng		
		Vỗ: tốc độ, độ rộng		
		Gõ: tốc độ, độ rộng		
		Đấm bóp kết hợp vỗ: tốc độ, độ rộng		
Tốc độ	Speed	5 cấp độ điều chỉnh tốc độ		 Speed
Độ rộng	Width	3 cấp độ điều chỉnh độ rộng		 Width
Massage vùng sống lưng		Tác dụng lên điểm cố định		
		Tác động lên một vùng cục bộ trên sống lưng		
		Tác động toàn bộ vùng sống lưng		
	↑	Điều chỉnh vị trí massage (ở chế độ điểm cố định và cục bộ)	Thao tác LÊN	
	↓		Thao tác XUỐNG	

◆ Chế độ massage túi khí

Tính năng	Phím	Mô tả	Hiển thị
Massage túi khí	Mode	Toàn bộ túi khí: sử dụng toàn bộ túi khí trên cơ thể	Arm  Feet 
		Túi khí tay: chỉ sử dụng túi khí tay	Arm 
		Túi khí chân: chỉ sử dụng túi khí chân và bàn chân	Feet 
Cường độ	Intensity	3 cấp độ điều chỉnh cường độ	Arm  Feet 

◆ Chế độ massage bàn chân

Tính năng	Phím	Mô tả	Hiển thị
Massage con lăn bàn chân	Foot Roller	Bật / tắt chế độ massage chân bằng con lăn. Có thể chuyển đổi giữa 4 trạng thái: cường độ nhẹ, trung bình, mạnh, tắt.	

THAO TÁC TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

◆ **Điều chỉnh tư thế nằm:** Thao tác các phím chức năng này để thay đổi tư thế ghế. Bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp cho đến khi quá trình chuyển đổi tư thế kết thúc.

Tính năng	Phím	Mô tả
Nâng chân lên		Khi bạn nhấn giữ phím , ghế sẽ từ từ nâng phần chân lên.
Hạ chân xuống		Khi bạn nhấn giữ phím , ghế sẽ từ từ hạ phần chân lên.
Dựng ghế		Khi bạn nhấn giữ phím , ghế sẽ từ từ nâng phần tựa lưng lên và hạ phần chân xuống. Tính năng này cũng sẽ đưa tư thế ghế về vị trí ban đầu khi muốn ra khỏi ghế.
Tư thế nằm		Khi bạn nhấn giữ phím , ghế sẽ từ từ hạ phần tựa lưng xuống và nâng phần chân lên, tạo thành tư thế nằm thoải mái hơn. Đây cũng là tính năng tự động mỗi khi khởi động ghế.
Không trọng lực		Khi bạn bấm phím , ghế sẽ bật hoặc chuyển đổi chế độ hoặc tắt tính năng. Ghế có 3 chế độ không trọng lực. Khi bạn nhấn giữ phím trong 3 giây , ghế sẽ bật/tắt chế độ điều khiển giọng nói.

◆ Chế độ nhiệt hồng ngoại

Tính năng	Phím	Mô tả	Hiển thị
Massage nhiệt hồng ngoại		Bật hoặc tắt chức năng massage hồng ngoại. Bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp sau 3 phút kích hoạt chức năng.	

◆ Các tính năng khác

Tính năng	Phím	Mô tả	Hiển thị
Tạm dừng / tiếp tục		Nhấn phím này trong khi massage để tạm dừng hoạt động. Khi tiếp tục sử dụng lại nhấn phím này một lần nữa. Ghế massage sẽ tắt sau 20 phút nếu không dừng lại.	
Thời gian massage		Điều chỉnh thời gian. Sau mỗi lần nhấn phím, thời lượng sẽ tăng thêm 5 phút. Tổng thời lượng không quá 30 phút.	

CHẾ ĐỘ ĐIỀU KHIỂN GIỌNG NÓI

◆ **Để bật chế độ:** Nhấn giữ phím  trên bảng điều khiển trong 3 giây. Ghế sẽ trả lời: "Điều khiển giọng nói được bật" và khởi động chế độ điều khiển giọng nói.

◆ **Để tắt chế độ:** Nhấn giữ phím  trên bảng điều khiển trong 3 giây. Ghế sẽ trả lời: "Tắt điều khiển giọng nói" và tắt chế độ điều khiển giọng nói.

◆ **Các sử dụng chế độ:**

- Quay mặt về phía loa phải của ghế để nói khẩu lệnh.
- Mỗi lần sử dụng chế độ điều khiển, bạn nói khẩu lệnh mở đầu "**Xin Chào**" và máy xác nhận lại bằng câu "**Chào bạn**". Sau đó trong vòng 6 giây bạn nói khẩu lệnh tương ứng với các chức năng ở mục bên dưới. Khi ghế xác nhận lại bằng "**OK**" sẽ khởi động chức năng tương ứng.

Mở đầu: "Xin chào" - Ghế trả lời: "Chào Bạn"		
STT	Khẩu lệnh	Ghế trả lời
1	Mở máy	OK
2	Tắt máy	OK
3	Nhẹ nhàng	OK
4	Thư giãn	OK
5	Toàn thân	OK
9	Cổ vai	OK
7	Lưng eo	OK
8	Kéo giãn	OK
9	Cố định	OK
10	Chế độ khác	OK
11	Xuống	OK
12	Lên	OK
13	Túi khí	OK
14	Tắt túi khí	OK
15	Nâng lên	OK
16	Hạ xuống	OK
17	Dừng lại	OK

Lưu ý: Bạn cần phát âm rõ ràng, chậm rãi. Một số khẩu lệnh sẽ không tương thích với chế độ đang hoạt động ghế sẽ không trả lời "**OK**" và thay đổi chức năng. Danh sách khẩu lệnh được dán đằng sau bảng điều khiển.


CÁC HƯỚNG DẪN KHÁC

◆ Sử dụng chức năng Bluetooth

Mở Cài đặt và chọn chức năng Bluetooth trên thiết bị di động của bạn >> Kết nối với thiết bị có tên **IMCM-62B9** trong danh sách thiết bị là bạn đã kết nối bluetooth với ghế massage OR-180.

◆ Tắt nguồn và ngừng massage

- Nhấn phím  (bật / tắt) hệ thống sẽ dừng tất cả các chế độ, hoạt động massage ngay lập tức. Tư thế ghế tự động trở về vị trí mặc định.
- Khi hết thời gian massage, tất cả các chức năng massage sẽ TẮT, nhưng tư thế ghế sẽ không quay về vị trí mặc định.
- Ngắt nguồn điện (xem hình dưới).

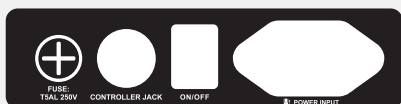


Tắt công tắc và rút dây nguồn khỏi ghế




Rút dây nguồn khỏi nguồn điện

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT


◆ Hướng dẫn lắp đặt phần giá đỡ chân tại vị trí tiếp giáp thân ghế và chân ghế:

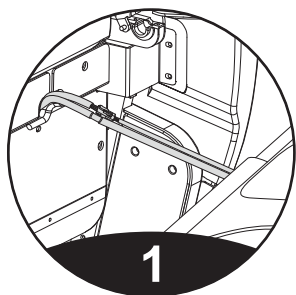


Kết nối dây cáp và ống khí giữa chân ghế và thân ghế

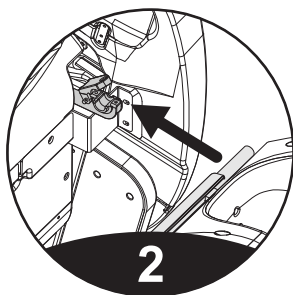


Bật nắp các giá đỡ của thân ghế, đặt các đầu ống tròn của chân ghế lên đó

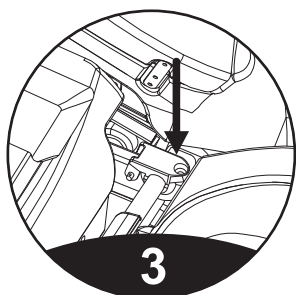

Đóng nắp các phần cố định giá đỡ thân ghế

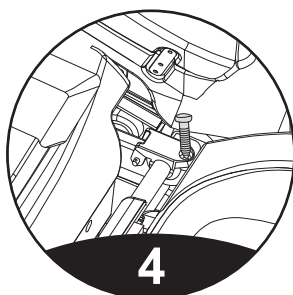

Bắt chặt phần giá đỡ bằng hai vít M4

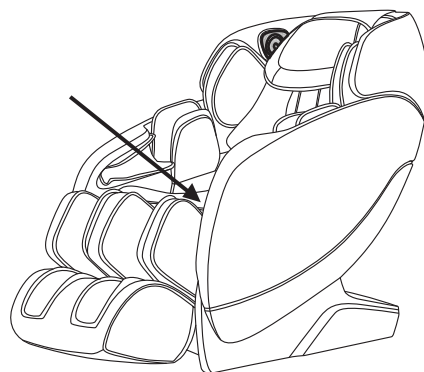

Lưu ý: Kiểm tra xem có bất thường nào trong quá trình nâng lên hạ xuống, hoặc bất kỳ ống, cáp hoặc dây điện nào bị gấp khúc hay không. Bật máy và sử dụng các chức năng ở chân ghế để kiểm tra xem ghế hoạt động bình thường chưa.


◆ **Tháo lắp, sử dụng phần đệm đầu (gối đầu) và đệm lưng:** Đệm đầu cho phép bạn điều chỉnh cường độ mát xa cổ và vai. Bạn có thể chọn việc sử dụng các phần này hoặc không (khuyến khích sử dụng):



Đệm lưng và lưng ghế được nối bằng khóa kéo




Đệm đầu và lưng ghế được nối bằng khóa dán

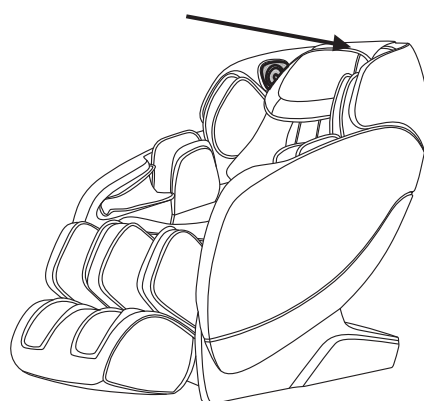

ĐẶT GHẾ VÀ DI CHUYỂN GHẾ

◆ Bảo vệ bề mặt sàn nơi đặt ghế


Ghế massage OR-180 có trọng lượng lớn, khi để lâu lên sàn có thể làm hỏng sàn của bạn. Vì vậy, hãy đặt một tấm thảm hoặc đệm trên sàn để tránh việc bị trầy xước, hỏng sàn.

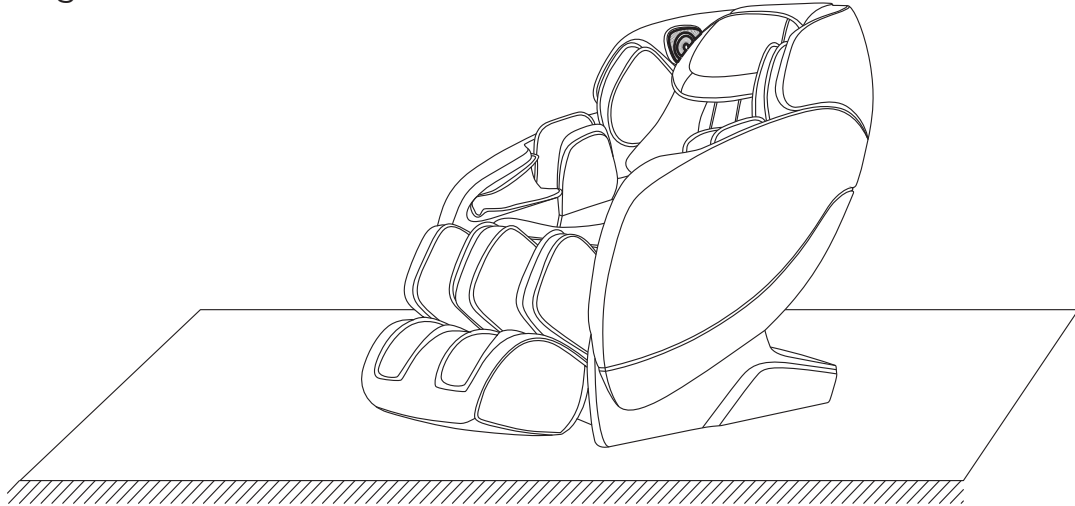

Lưu ý: Không di chuyển ghế bằng bánh xe trên nền gỗ ghe hoặc trong không gian hẹp. Cần ít nhất hai người di chuyển, nâng lên. Trong quá trình nâng, chọn các rãnh của nắp lưng tựa làm điểm lấy lực nâng, không nhắc trực tiếp tay vịn lên.

◆ Di chuyển ghế

Tháo tất cả các dây ra khỏi ghế (dây điện, dây bộ điều khiển). Ấn phần tựa lưng xuống 1 góc nhất định sao cho trọng tâm ghế đặt trên các bánh xe). Đẩy ghế về phía trước, di chuyển đến vị trí phù hợp.

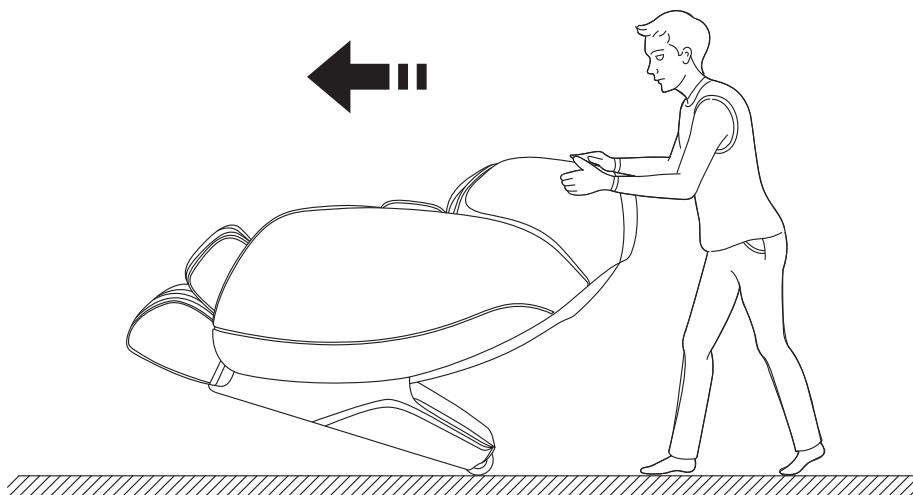


◆ **Cảnh báo:** Di chuyển ghế bằng bánh xe chỉ phù hợp với cho khoảng cách nhỏ, bề mặt phẳng và cứng, tốc độ chậm. Với các trường hợp khác, bạn vui lòng nâng ghế hoặc sử dụng các dụng cụ phụ trợ di chuyển.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

Làm sạch da ghế, lau sạch da ghế bằng vải khô mềm.

- Không lau sản phẩm bằng các hóa chất pha loãng như xăng và cồn.
- Khi sử dụng sản phẩm vệ sinh đồ da được bán trên thị trường, hãy làm đúng theo hướng dẫn sử dụng.
- Nếu da ghế bẩn, bạn có thể áp dụng bước dưới đây:
 - Bước 1: Ngâm một miếng vải mềm vào dung dịch chất tẩy rửa trung tính từ 3% đến 5% và nước ấm, sau đó vắt khô.
 - Bước 2: Lau bề mặt da ghế bằng vải mềm ẩm có chứa dung dịch trên.
 - Bước 3: Lau ghế massage một lần nữa bằng vải mềm khô để loại bỏ cặn bẩn
 - Bước 4: Để da ghế tự khô trong không khí một khoảng thời gian từ 15-20 phút.

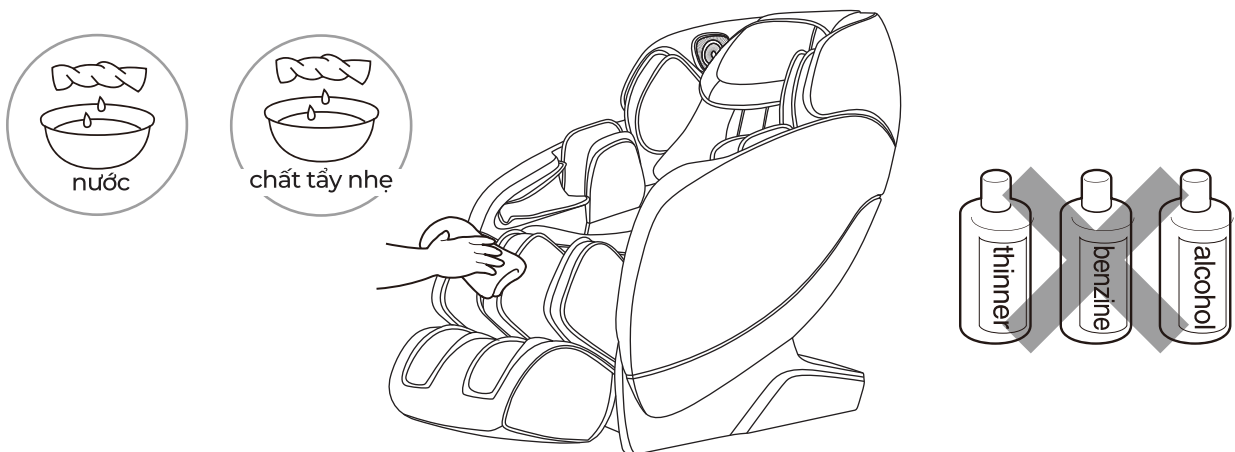


- Không làm khô bề mặt da ghế massage bằng máy sấy tóc.
- Chú ý là màu vải có thể bám lên bề mặt da ghế, hãy cẩn thận khi lau sản phẩm bằng vải denim hoặc vải màu.

Vệ sinh các phần ghế massage có chất liệu bằng nhựa thực hiện theo các bước dưới đây:

- Bước 1: Ngâm một mảnh vải mềm trong nước ấm hoặc chất tẩy rửa trung tính, vắt kiệt và lau các bộ phận ghế massage bằng nhựa một cách nhẹ nhàng. Không lau ghế massage bằng các hóa chất pha loãng như xăng và cồn.

- Bước 2: Lau các cạnh bản trên ghế bằng khăn mềm đã được ngâm trong nước sạch và vắt khô. Dùng miếng vải khô để lau bảng điều khiển.
- Bước 3: Để một khoảng thời gian trong không khí cho ghế massage được khô hoàn toàn.

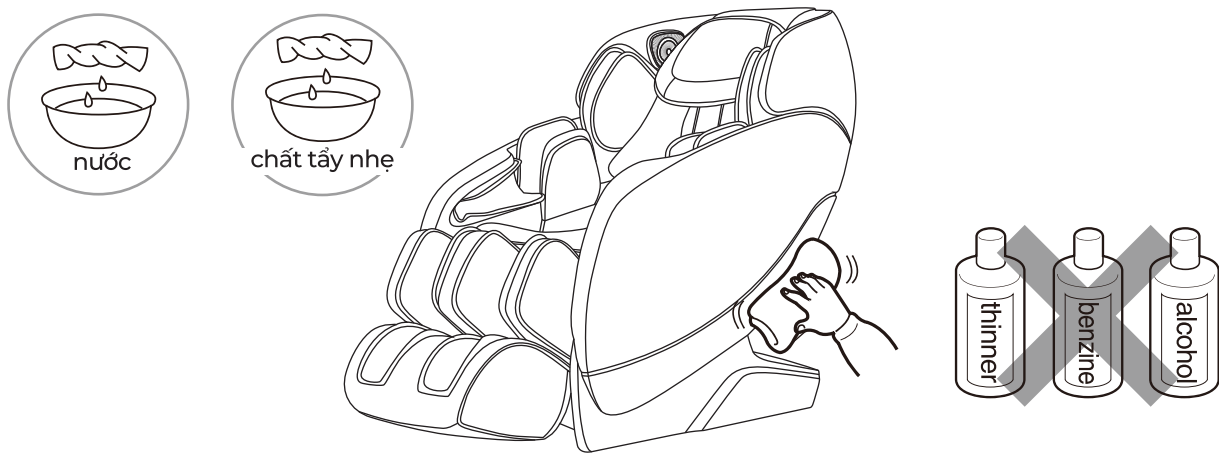

Bảo quản

Sau khi lau sạch vết bẩn và bụi, hãy để ghế ở nơi khô ráo.

Nếu không sử dụng trong một thời gian dài, bạn nên đặt một tấm vải phủ lên trên để tránh bụi bám bám dính.

Đảm bảo môi trường hoạt động của ghế

- Không đặt ghế massage trong môi trường ẩm ướt như phòng tắm.
- Ngừng sử dụng sản phẩm này khi nhiệt độ môi trường thay đổi bất thường.
- Không sử dụng ghế massage trong môi trường có nhiều bụi bẩn hoặc khí ăn mòn.
- Không dùng sản phẩm này trong không gian nhỏ hoặc nơi không có hệ thống thông gió tốt.
- Nhiệt độ phòng để ghế massage trong khoảng từ 0 ° C đến 35 ° C.
- Không đặt sản phẩm ghế massage OR-180 ở ngoài trời.
- Tránh ánh nắng trực tiếp.
- Để sản phẩm này cách xa mọi nguồn nhiệt như bếp nấu, cửa thoát khí của máy điều hòa.
- Không sử dụng sản phẩm khi trời có sấm sét.

NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ THỂ GẶP PHẢI



Không được tháo rời, tự sửa chữa hoặc điều chỉnh ghế khi chưa có hiểu biết. Điều này có thể gây ra chập điện khiến bạn bị thương và làm hư hại sản phẩm.

Trong quá trình hoạt động của ghế massage, những âm thanh có thể phát ra liên quan đến túi khí hoặc cơ chế massage đặc biệt.

- Âm thanh của con lăn massage di chuyển lên xuống.
- Âm thanh của động cơ trong quá trình massage.
- Âm thanh ma sát của con lăn massage và áo bọc ghế (đặc biệt khi xoa bóp).
- Tiếng vỗ và xoa bóp theo hình tròn (đặc biệt khi di chuyển từ vai ra sau).
- Tốc độ massage khác nhau tạo ra mức độ âm thanh khác nhau.
- Âm thanh động cơ khi tăng tải.
- Trong chương trình tự động, âm thanh của các con lăn massage sẽ tự động điều chỉnh để phù hợp với hình dáng cơ thể của người dùng.
- Âm thanh trong quá trình xoa bóp bằng túi khí.
- Tiếng ma sát từ phần lưng và thành ghế khi nâng ghế ngả phía sau.
- Con lăn massage bên trái và bên phải có độ cao khác nhau sẽ có âm thanh ở mức độ khác nhau.

BẢO TRÌ VÀ BẢO HÀNH

Bảo trì

Nếu bạn không sử dụng ghế massage trong khoảng thời gian dài, hãy thực hiện bảo trì trước khi sử dụng

Bạn có thể tiến hành kiểm tra xem có xuất hiện các hiện tượng bất thường ở ghế hay không:

- Có mùi lạ, mùi khét
- Âm thanh bất thường phát ra
- Dây nguồn và phích cắm nóng bất thường
- Ghế massage dừng hoạt động bất ngờ
- Các hiện tượng bất thường khác

NGƯNG SỬ DỤNG

Để tránh sự cố hoặc tai nạn có thể xảy ra, bạn hãy tắt nguồn và rút phích cắm sau đó gọi nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra sửa chữa

Bảo hành

- Sản phẩm được bảo hành 6 năm.
- Sản phẩm được sản xuất theo quy tắc nghiêm ngặt và được kiểm tra tỉ mỉ trước khi giao hàng.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

- Sản phẩm sẽ được trung tâm bảo hành của Oreni sửa chữa miễn phí, nếu hư hỏng được xác định do lỗi của nhà sản xuất.
- Trung tâm bảo hành không nhận sửa chữa qua các đại lý, trừ trường hợp đại lý đã thỏa thuận ủy quyền trực tiếp với công ty. Khách hàng liên hệ trực tiếp với trung tâm bảo hành của công ty.
- Khi khách hàng mang sản phẩm đi bảo hành lưu ý nhớ mang theo phiếu bảo hành kèm theo.

Những trường hợp sau đây sẽ không được bảo hành:

1. Phiếu bảo hành không được điền đầy đủ những thông tin theo quy định.
2. Số seri trên sản phẩm, trên phiếu bảo hành không giống nhau, bị tẩy xóa hoặc sửa chữa.
3. Tự ý tháo gỡ, thay đổi cấu trúc sản phẩm, sửa chữa tại những nơi không phải do Oreni ủy quyền.
4. Có dấu hiệu cháy, khét, có dấu hiệu côn trùng hay chuột phá hại.
5. Các sự cố hư hỏng, rách nát phần da và nhựa bị mòn xước trong quá trình sử dụng.
6. Các lỗi do va chạm, gây vỡ trong quá trình sử dụng, vận chuyển và lắp đặt.
7. Các hư hỏng do:
 - Vận chuyển, sản phẩm sử dụng không đúng theo hướng dẫn.
 - Vết trầy xước, bẩn, rỉ sét, vết mòn do điều kiện bảo quản, sử dụng.
 - Các tai nạn khách quan: hỏa hoạn, lũ lụt, sét đánh...
 - Các bộ phận bên ngoài: vỏ thùng, vỏ hộp, vỏ sản phẩm...
 - Các phụ kiện tiêu hao: adaptor, bóng đèn, thẻ nhớ, tai nghe,... các sản phẩm khuyến mại nếu có.

Trường hợp được bảo hành:

1. Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật, dẫn đến không sử dụng được.
2. Lỗi do hư hỏng của chính linh kiện do trong quá trình sử dụng bình thường, đúng thiết kế của nhà sản xuất.



Công ty TNHH ORENI Việt Nam

Địa chỉ: 208D Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 1800 1238

Email: info@oreni.vn

Website: www.oreni.vn