




MỘT PHẦN TẤT YẾU CHO CUỘC SỐNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ghế massage không trọng lực

OR - 170

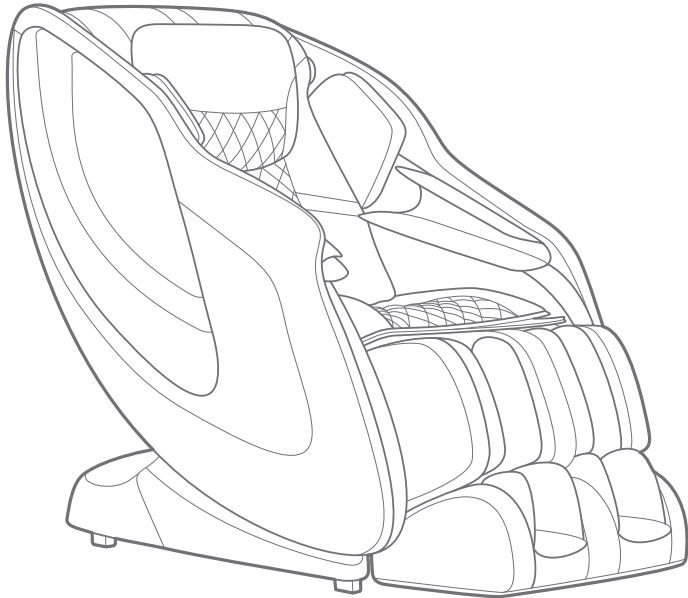

 **CẢNH BÁO:**

Không dùng ghế massage cho người dưới 18 tuổi, những người không có khả năng kiểm soát hành vi (bệnh nhân tâm thần, người thiếu năng trí tuệ, bệnh nhân bại liệt, V.V). Nếu để người thuộc những đối tượng nêu trên sử dụng ghế có thể dẫn đến bị điện giật hoặc gây thương tích cho người dùng.

Cảm ơn quý khách đã mua ghế massage do công ty chúng tôi sản xuất.
Những cải tiến về sản phẩm sẽ được công ty chúng tôi thông tin chi tiết nếu có.
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn. Sau khi đọc xong, hãy cất ở nơi có thể đọc lại dễ dàng bất cứ lúc nào.

DANH MỤC

Những cảnh báo an toàn quan trọng	1
Cách lắp đặt ghế	7
Trước mỗi lần massage	9
Các bộ phận của ghế	11
Bảng điều khiển	13
Hướng dẫn sử dụng	14
Kết thúc quá trình massage	18
Vệ sinh và bảo quản	19
Những vấn đề có thể gặp phải	21
Bảo trì và bảo hành	22
Điều kiện bảo hành	23
Thông số kỹ thuật sản phẩm	24

NHỮNG CẢNH BÁO AN TOÀN QUAN TRỌNG

Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ lưu ý an toàn này và sử dụng đúng cách.

Các biện pháp phòng ngừa được nêu ra với mục đích nhắc nhở bạn sử dụng sản phẩm này đúng cách để tránh sự cố ngoài mong muốn, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài sản.

Các biện pháp phòng ngừa được chia thành hai loại: "Cảnh báo" và "Thận trọng". Ví dụ:



CẢNH BÁO

Nếu sử dụng không đúng cách, người dùng có thể gặp chấn thương không mong muốn, tổn hại đến vật dụng, tài sản xung quanh hiện có.



THẬN TRỌNG

Thiết bị có bề mặt được nung nóng. Những người không nhạy cảm với nhiệt độ phải cẩn thận khi sử dụng thiết bị.

GIẢI NGHĨA CÁC BIỂU TƯỢNG

		Cảnh báo hoặc Chú ý (Ví dụ bên trái hiển thị các cảnh báo và lưu ý chung)
		Hành vi bị cấm (Ví dụ bên trái thể hiện cấm tháo rời)
		Chỉ dẫn nội dung bắt buộc và hướng dẫn (Ví dụ bên trái cho thấy việc rút phích cắm)



Những trường hợp sau đây phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng:

- ◆ Bệnh nhân ung thư
- ◆ Phụ nữ mang thai hoặc trong thời kỳ kinh nguyệt
- ◆ Người bị sốt cao
- ◆ Bệnh nhân bị bệnh cấp tính (đang trong tình trạng đau đớn)
- ◆ Bệnh nhân bị bệnh loãng xương
- ◆ Bệnh nhân bị rối loạn tri giác
- ◆ Người bị bệnh tim mạch
- ◆ Người bị bệnh thiếu máu
- ◆ Người sử dụng thiết bị tạo nhịp tim (trợ tim) hoặc các thiết bị cấy ghép vào cơ thể
- ◆ Người bị dị dạng, có bất thường hoặc cong vẹo cột sống
- ◆ Người đang điều trị hoặc cảm thấy bất thường về thể chất
- ◆ Người đang điều trị hoặc bị tổn thương trước đó các bộ phận trên cơ thể
- ◆ Người bị rối loạn tuần hoàn máu bàn chân
- ◆ Người khiếm thị

 LƯU Ý

Rút nguồn điện ngay lập tức khi sản phẩm không thể hoạt động hoặc sự cố bất thường và liên hệ bộ phận bảo hành kiểm tra, sửa chữa để tránh điện giật, rò rỉ, đoản mạch và cháy nổ.

Khi xoa bóp quanh cổ, chú ý đến chuyển động của con lăn massage và không nên để chế độ xoa bóp quá mạnh. Điều này có thể khiến bạn bị đau, thậm chí chấn thương.

Khi nâng / hạ lưng ghế và chỗ để chân, vui lòng đảm bảo rằng không có người, đồ vật hoặc vật nuôi ở phía trước và dưới chỗ để chân để tránh sự cố xảy ra.

Trước khi sử dụng, kiểm tra lớp da ghế đảm bảo không bị hư hại dẫn đến bị thương hoặc điện giật do rò rỉ (nếu bị hỏng, ngừng sử dụng ngay lập tức, rút nguồn điện và yêu cầu sửa chữa).



Trước khi sử dụng, đảm bảo rằng bạn không đeo bất kỳ phụ kiện nào (vòng tay, đồng hồ...) để tránh bị thương.


Chỉ nên massage trong khoảng 15-20 phút, 1 ngày không quá 2 lần, một bộ phận cơ thể trong vòng 5 phút. Xoa bóp liên tục trong thời gian quá dài có thể gây đau cơ và dây thần kinh.

Nếu bạn cảm thấy bất kỳ bất thường nào trong quá trình massage, vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức.

Sau khi sử dụng, vui lòng tắt công tắc nguồn để đề phòng tai nạn do trẻ em nghịch phá.

Đặt ghế massage trên mặt sàn nằm ngang, tránh đặt chỗ sàn bị nghiêng hoặc gỗ ghế không bằng phẳng.

	<p>Không nên kéo dây cáp điều khiển quá căng để tránh tai nạn hoặc thương tích.</p>
	<p>Vui lòng kiểm tra vị trí của con lăn massage trước khi sử dụng để tránh tai nạn hoặc thương tích.</p>
	<p>Di chuyển ghế ổn định để tránh trầy xước bề mặt.</p>
	<p>Không sử dụng nguồn điện vượt quy chuẩn của ghế dẫn tới nguy cơ bị điện giật hoặc phát ra tia lửa điện.</p>
	<p>Nếu dây điện hoặc phích cắm bị hỏng, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức để tránh điện giật, đoản mạch và tia lửa điện.</p>
	<p>Không làm hỏng, tái chế, bẻ cong, kéo căng, xoắn, dính hoặc thắt chặt dây nguồn. Ngoài ra, không để dây điện dưới các vật nặng, đặc biệt không làm vướng hoặc kẹp dây trong quá trình di chuyển. Dây nguồn hỏng có nguy cơ bị điện giật hoặc phát ra tia lửa điện.</p>
	<p>Không cho trẻ em sử dụng một mình và đặt ghế tránh xa trẻ nhỏ.</p>
	<p>Không cho trẻ em chơi trên ghế để tránh bị thương hoặc hỏng hóc.</p>
	<p>Không sử dụng thiết bị trị liệu khác trong khi sử dụng ghế massage này.</p>
	<p>Không ngủ gật trong khi xoa bóp vì xoa bóp vô thức có thể gây thương tích hoặc khó chịu khi tỉnh dậy.</p>
<p>Không sử dụng ghế cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài massage để tránh hỏng hóc hoặc tai nạn.</p>	


	<p>Đảm bảo cắm hết phích cắm và đảm bảo không có chân cắm hoặc phích cắm bị kẹt bởi vật thể lạ nguy cơ gây ra điện giật, đoản mạch và hỏa hoạn.</p>
	<p>Không sử dụng gần ngọn lửa trần, chẳng hạn như bếp lò. Không sử dụng khi đang hút thuốc. Không sử dụng trên các thiết bị sưởi ấm, chẳng hạn như chăn điện, vì nó có thể gây ra hỏa hoạn.</p>
	<p>Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan, thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi có người hướng dẫn an toàn và được giám sát trong khi sử dụng thiết bị. Trẻ em phải được người lớn giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị gây lỗi sản phẩm hay bị chấn thương.</p>
	<p>Không kéo da quá mạnh. Không dùng lực hoặc vật sắc nhọn chọc thủng da để tránh bị thương và hồng hóc.</p>
	<p>Không lau bằng xăng, dung dịch pha loãng,... Không xịt thuốc diệt côn trùng để tránh chập điện, phát tia lửa điện.</p>
	<p>Không ngồi trên tựa lưng, tay vịn hoặc gác chân để tránh bị thương hoặc gây hư hại ghế.</p>
	<p>Không di chuyển bánh xe hoặc kéo ghế trên bề mặt dễ bị trầy xước, hư hại sàn (như sàn gỗ hoặc thảm).</p>
	<p>Không làm rơi ghế hoặc va đập với lực mạnh để tránh bị thương hoặc hư hỏng ghế.</p>
	<p>Không sử dụng ghế ngay sau khi ăn để tránh cảm giác khó chịu.</p>

	Không di chuyển ghế khi có người đang sử dụng để tránh bị thương hoặc gây hư hại ghế.
	Chỉ 01 người sử dụng ghế tại một thời điểm.
	Không kẹp tay và chân vào giữa các con lăn massage để tránh bị thương và khó chịu.
	Không sử dụng ghế khi đeo các vật cứng, chẳng hạn như phụ kiện tóc, vòng tay...
	Không để đầu và tay của bạn dưới chỗ để chân và dưới ghế để tránh tai nạn hoặc thương tích.
	Trong trường hợp mất điện, vui lòng tắt ngay công tắc nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm để tránh tai nạn khi có điện trở lại.
	Khi rút phích cắm, vui lòng giữ phần phích cắm ở phần nhựa và không kéo dây nguồn, tránh nguy cơ bị điện giật hoặc đoản mạch, đứt dây, có thể gây cháy.
	Khi không sử dụng thời gian dài, vui lòng rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm, che phủ cẩn thận vì bụi và hơi ẩm sẽ làm giảm tuổi thọ của ghế.
	Khi tiến hành bảo trì, vui lòng rút phích cắm ra khỏi ổ cắm. Ngoài ra, không cắm hoặc tháo phích cắm khi tay ướt vì có thể gây điện giật và thương tích.
	Không đặt ở nơi ẩm ướt như phòng tắm vì có thể gây chập điện, cháy nổ, hỏng hóc và rỉ sét.
	Ngoại trừ các kỹ thuật viên dịch vụ, không ai được tháo rời, sửa chữa hoặc chỉnh sửa ghế. Nếu cần sửa chữa thay thế hãy gọi cho nhân viên chăm sóc bảo dưỡng bảo trì nơi mua sản phẩm.

Cách lắp đặt ghế

Vị trí đặt ghế massage

Vui lòng đảm bảo có đủ không gian xung quanh để ghế massage có thể ngả ra sau.

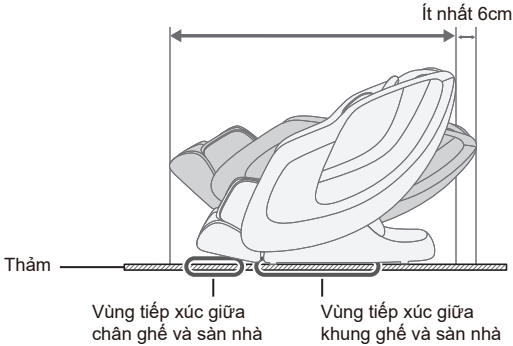


Không đặt ghế gần những nguồn phát nhiệt, lò sưởi hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, vì làm phai màu hoặc làm hỏng da ghế.

Nên sử dụng thảm lót dưới ghế massage để tránh làm hỏng sàn nhà. Kích thước của thảm phải đủ lớn để che chỗ tiếp xúc giữa chân ghế, khung ghế với sàn. Diện tích sàn (ít nhất 200x90cm), như trong hình.

Nên đặt ghế gần ổ cắm điện.

Cách di chuyển ghế

Phương pháp 1: Nhấc hai bên dưới cùng của khung ghế để nâng lên và di chuyển đến vị trí phù hợp.

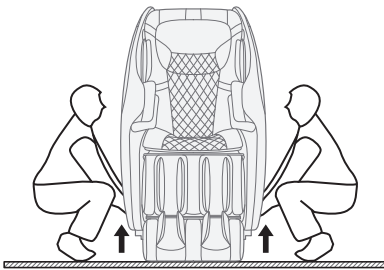

Do ghế có trọng lượng lớn, hãy nâng ghế một cách cẩn thận để tránh làm rơi ghế hoặc chấn thương (Cần ít nhất hai người để di chuyển, nâng lên).

Trọng lượng ghế

Xấp xỉ 74kg

※ Lưu ý:

1. Vui lòng nâng lên và di chuyển ghế để tránh làm hỏng sàn.
2. Hãy đưa tay vào phía dưới của khung ghế để giữ khung thép và nhấc nó lên, để không làm hỏng các bộ phận nhựa trên mặt ngoài của khung ghế.

Đặt ghế massage trên sàn.

- Đặt ghế xuống từ từ và cẩn thận để không làm đè lên chân của bạn.
- Không hạ phần chân trước khi ghế được đặt hoàn toàn trên mặt phẳng. Hạ một cách đột ngột có thể làm chân ghế bị hỏng.
- Sàn nhà có thể bị hư hại. Vì vậy, hãy đặt một tấm thảm hoặc đệm trên sàn để tránh trầy xước, hỏng sàn.



Thận trọng

- Không kéo hoặc đẩy ghế khi ghế không được lắp đặt hoàn chỉnh.
- Không nhắc trực tiếp tay vịn hoặc các bộ phận bằng nhựa bên ngoài của khung ghế để di chuyển. Nếu không, có thể làm hỏng ghế hoặc bị thương.
- Nếu cần dùng bánh xe để di chuyển, bạn nên đặt một tấm thảm dưới vị trí di chuyển để tránh làm xước sàn.
- Không di chuyển ghế massage khi có người đang ngồi trên ghế. Nếu không, có thể làm hỏng ghế hoặc chấn thương do bị ngã.
- Vui lòng tắt máy và đảm bảo rằng tựa lưng, chỗ để chân ở vị trí ban đầu trước khi di chuyển ghế. Nếu không, có thể làm hỏng ghế hoặc bị thương.

Phương pháp 2: Sử dụng bánh xe phía sau để di chuyển ghế massage.




Thận trọng

Nếu dùng bánh xe phía sau để di chuyển ghế, xin vui lòng đặt một tấm thảm trên sàn nhà để tránh trầy xước, hỏng sàn.

- 1 Nhấn phím “bật / tắt” để tắt tất cả các chức năng.
- 2 Đặt lại tựa lưng và chân ghế về vị trí ban đầu. Tắt công tắc nguồn và rút phích cắm điện.

Nghiêng ghế về phía sau khoảng 45° và sử dụng bánh xe để đẩy về phía trước hoặc kéo về phía sau vào vị trí thích hợp.


Chi chú: Chỉ nên nghiêng ghế về sau 1 góc vừa phải để không làm hỏng chân ghế.

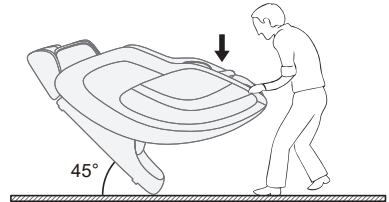

Trước mỗi lần massage

1 Kiểm tra môi trường xung quanh

Đảm bảo không có người, vật nuôi hay đồ vật xung quanh lưng ghế hay bên dưới chỗ để chân.

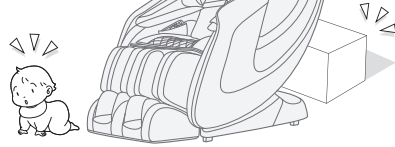


2 Đảm bảo không có vật lạ lọt vào khe ghế.

Trước khi massage, hãy đảm bảo rằng không có vật lạ ở chân, đệm ngồi và các vị trí khác.



Thận trọng

- Không cho tay, ngón tay, bàn chân và đầu vào giữa các khe hở giữa chân ghế và đệm ngồi, giữa chân và tay vịn.
- Hãy đảm bảo rằng không có vật lạ giữa các bộ phận của ghế trước khi ngồi xuống.
- Không cho tay, cánh tay hoặc đầu vào khoảng trống giữa tựa lưng và tường.
- Không đặt vật nuôi của bạn trên ghế massage (đệm ngồi, tựa lưng, tay vịn, chân, v.v.)

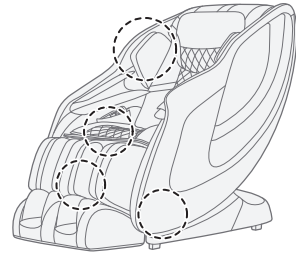

3 Kết nối với nguồn điện.


Trước khi massage, hãy đảm bảo rằng không có vật lạ ở chân, đệm ngồi và các vị trí khác.




Thận trọng

- Trước khi sử dụng, vui lòng kiểm tra xem dây nguồn và phích cắm điện có bị hỏng hay không.
- Hãy đảm bảo rằng không có vật thể lạ giữa các bộ phận của ghế trước khi ngồi xuống.
Hãy chắc chắn cắm hết phích cắm điện vào ổ điện. Nếu không, có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn do quá nhiệt.
- Vui lòng sử dụng dòng điện xoay chiều 220-240V ~ 50-60Hz.
Không sử dụng sản phẩm này ở nước ngoài hoặc kết nối nó với máy biến áp khi không có sự cho phép.
Nếu không, có thể gây điện giật, hỏng ghế hoặc hỏa hoạn do quá nhiệt.
- Không cắm và rút phích cắm điện khi tay ướt.

- 1 Cắm phích cắm điện vào ổ điện.

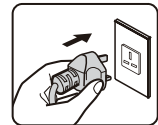

- 2 Bật công tắc nguồn (nằm bên dưới mặt sau của chỗ ngồi).

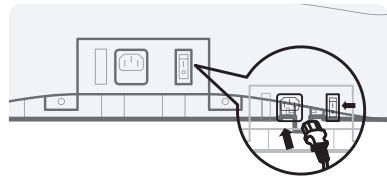


Trước mỗi lần massage

4 Đảm bảo con lăn massage ở vị trí ban đầu.

Nếu trước đó ghế đã được sử dụng mà chưa đặt về vị trí ban đầu thì nhấn phím “bật / tắt” để ghế trở về vị trí cũ



Nhấn phím “bật / tắt” để đặt lại về vị trí ban đầu.

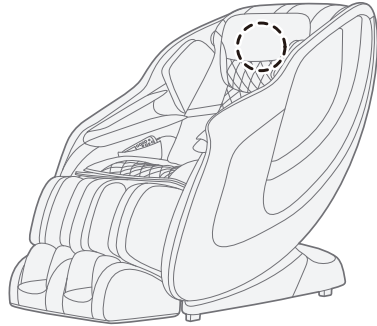

5 Đảm bảo rằng phần da ghế không bị hư hỏng và rách.


Khu vực kiểm tra đầu tiên là phần tựa lưng cho đến lớp tựa đầu của ghế.




Thận trọng

- Trước khi sử dụng, bạn phải kiểm tra phần da của đệm lưng, đảm bảo rằng nó không hư hỏng. Nếu có bất kỳ điều gì bất thường ở phần này thì hãy ngưng sử dụng và báo cho đội ngũ kỹ thuật đến kiểm tra trực tiếp.

Khu vực kiểm tra đầu tiên

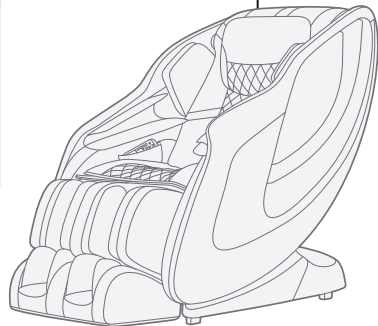


Các bộ phận của ghế

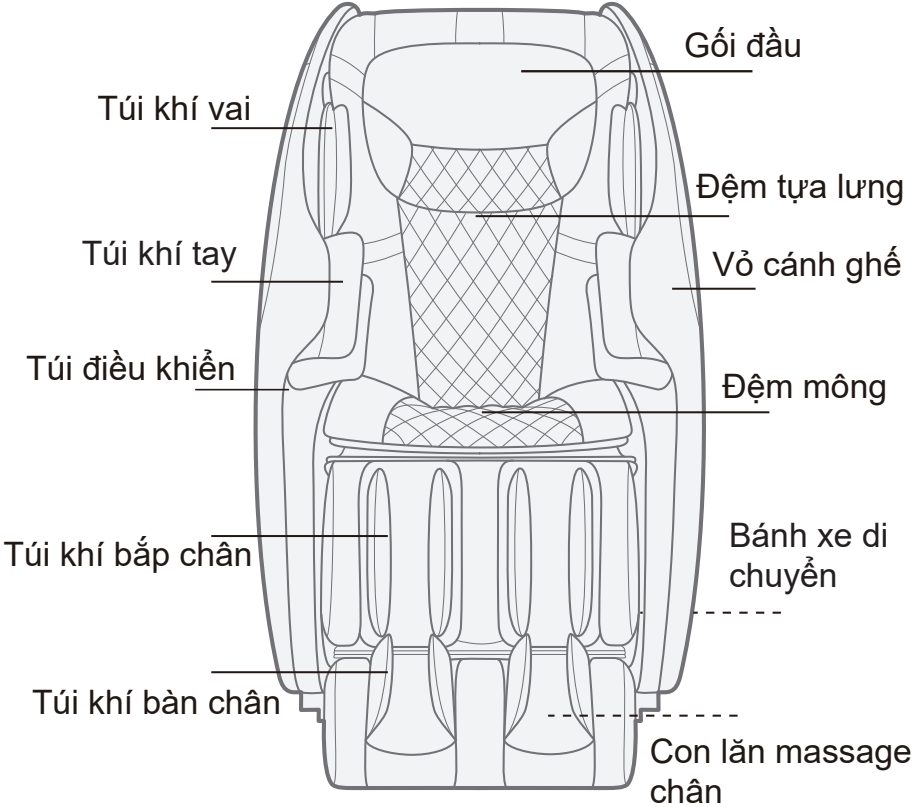


Các bộ phận của ghế

Sơ đồ phân bố các bộ phận ghế massage

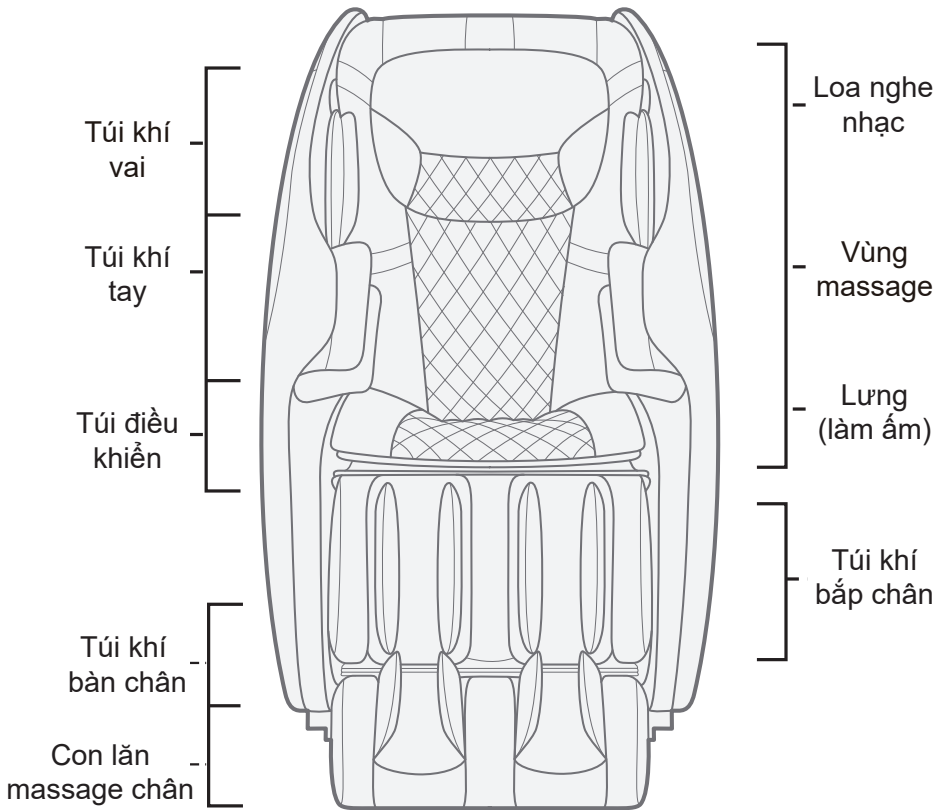

Bảng điều khiển

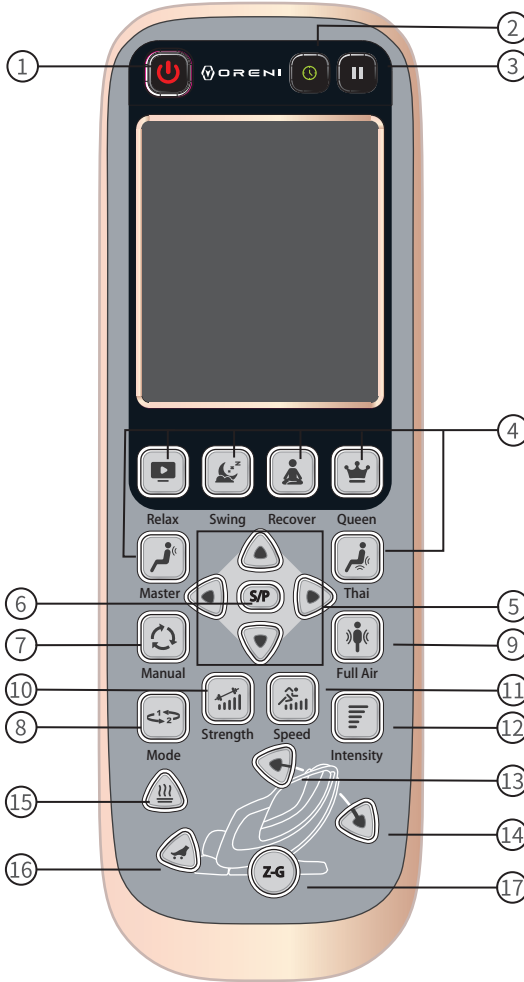

- 1 Nút bật/tắt
- 2 Thời gian
- 3 Tạm dừng
- 4 Chế độ tự động (6 chế độ)
/ Phạm vi tác động
- 5 Hướng lên & Hướng xuống
- 6 Điểm cố định / Khu vực
- 7 Chế độ massage thủ công
- 8 Các chế độ
- 9 Massage túi khí
- 10 Cường độ tác động
- 11 Tốc độ
- 12 Cường độ nén của túi khí
- 13 Năng lượng
- 14 Hạ năng
- 15 Massage nhiệt hồng ngoại
- 16 Massage con lăn bàn chân
- 17 Massage không trọng lực

Hướng dẫn sử dụng

I. Vui lòng lưu ý các thông tin dưới đây khi sử dụng sản phẩm:

1. Kết nối với nguồn điện và nhấn công tắc nguồn ở mặt sau - phía bên dưới phần chỗ ngồi của ghế.

Lúc này, ghế massage đang ở chế độ không trọng lực. Ở chế độ này, đèn màu đỏ ở nút BẬT/TẮT sẽ sáng, điều này có nghĩa là nguồn điện đã được kết nối.

2. Trong chế độ nhàn rỗi của ghế massage, chỉ có bốn chức năng: Bật / tắt, nâng lên, hạ xuống và tạm dừng có thể được vận hành.

II. Các thao tác trên bảng điều khiển

1. Bật / Tắt

Nút điều khiển Bật / Tắt:

- Nhấn một lần vào nút này, đèn nền LCD và nút BẬT / TẮT sẽ sáng.
- Nhấn nút bất kỳ để bắt đầu các chức năng massage của ghế. Cùng lúc ghế bắt đầu hoạt động thì chế độ hẹn giờ cũng sẽ được thiết lập.
- Nhấn lại nút này để dừng tất cả các chức năng massage: Con lăn massage, lưng ghế và phần chân ghế sẽ trở về vị trí ban đầu.

2. Hẹn giờ

Khi khởi động ghế massage thời gian sẽ được cài đặt mặc định là 15 phút. Khi ấn nút này một lần nữa, bạn có thể thay đổi thời gian thành 15 phút, 20 phút, 25 phút, 30 phút, 5 phút, 10 phút và 15 phút.

3. Tạm dừng

Nút tạm dừng / hoạt động

Khi ghế đang ở chế độ massage, nếu muốn dừng lại thì ấn nút tạm dừng. Nút tạm dừng sẽ nhấp nháy và đếm ngược thời gian để dừng lại.

4. Chế độ massage tự động toàn thân

- Có 6 chế độ massage tự động cho bạn: **Thư giãn, Đưa nôi, Phục hồi, Nữ hoàng, Bấm huyết chuyên sâu, Massage Thái.**

- Khi một trong 6 chế độ massage được kích hoạt, ghế sẽ tự động dò tìm huyết đạo, xác định các vị trí cổ, vai, lưng. Người sử dụng có thể ấn nút lên hoặc xuống để điều chỉnh cho phù hợp với vị trí cần massage.

5. Nâng lên / Hạ xuống & Điều chỉnh phạm vi tác động

Nâng lên / Hạ xuống 

Khi massage vai ở chế độ tự động hoặc cơ bản không đúng huyết đạo, vị trí cần massage bạn hãy đặt vai vào đúng vị trí và ấn nút lên/ xuống trong vòng 10s, “

Điều chỉnh phạm vi massage 

Có 3 mức điều chỉnh phạm vi massage: Sau khi điều chỉnh các chế độ vỗ, gõ, bấm huyết chuyên sâu hoặc đấm bóp người dùng có thể điều chỉnh phạm vi massage, tổng cộng có 3 mức: Hẹp, trung bình, rộng.

6. Điểm cố định / Khu vực

Chọn điểm / khu vực massage

- Nút này cho phép người dùng chọn điểm massage bất kỳ trên lưng. Ấn nút 1 lần để kích hoạt chế độ massage ở một điểm bất kỳ. Ấn lại lần nữa để chuyển sang chế độ massage theo khu vực.

- Chế độ massage sẽ xác định điểm vừa chọn là vị trí trung tâm và sẽ tác động trong vùng 8cm từ vị trí được chọn.

7. Chế độ massage thủ công

- Bấm nút này để kích hoạt chế độ massage thủ công cho phần trên cơ thể.

- Mỗi khi nhấn nút này, chức năng massage thủ công sẽ thay đổi theo thứ tự: “Nhào Trộn > Thụy Điển > Vỗ > Bấm Huyết Chuyên Sâu (Shiatsu) > Gõ > Lăn”.

8. Các chế độ Mode

Sau khi khởi động một trong các chế độ massage thủ công như “nhào trộn”, nhấn nút điều khiển này, kỹ thuật massage sẽ được điều chỉnh từ “Nhào trộn 1” thành “Nhào trộn 2” và tiếp tục như vậy.

9. Massage túi khí Full Air

Mỗi khi nhấn nút này, chức năng massage túi khí thủ công sẽ thay đổi theo trình tự **TOÀN THÂN > CHÂN > TAY > VAI > DỪNG LẠI**.

10. Cường độ massage Strength

Bấm phím này để điều chỉnh cường độ massage. Có 5 mức cường độ bạn có thể điều chỉnh khi massage từ Cấp độ 1 đến Cấp độ 5.

11. Tốc độ Speed

Bấm phím này để điều chỉnh tốc độ của con lăn massage. Có 5 mức điều chỉnh tốc độ từ chậm đến nhanh.

12. Cường độ nén của túi khí Intensity

Nút điều chỉnh mức độ nén bóp của túi khí - Có 5 cấp độ điều chỉnh. Sau khi kích hoạt chức năng massage bằng túi khí (Tự động và Thủ công), bấm nút này để điều chỉnh cường độ.

13/14. Nâng / Hạ lưng ghế

Nút điều khiển điều chỉnh góc cho ghế massage

Hai nút điều khiển này có thể điều chỉnh góc Nâng / Hạ lưng của tựa lưng tương ứng.

Nhấn một lần vào nút điều khiển Nâng hoặc Hạ, lưng ghế sẽ bắt đầu di chuyển. Khi

15. Massage nhiệt hồng ngoại

Nhấn nút này để kích hoạt chức năng Massage nhiệt hồng ngoại, nhấn nút một lần nữa để dừng chức năng này.

16. Massage con lăn bàn chân

Nhấn nút này để kích hoạt chức năng Massage con lăn bàn chân. Nhấn lại một lần nữa để dừng chức năng này.

17. Massage không trọng lực


Khi bạn bấm phím, ghế sẽ được bật chuyển đổi chế độ hoặc tắt chức năng. Ghế có 2 cấp độ không trọng lực.

Kết thúc quá trình massage

- 1** Rút phần massage chân về vị trí ban đầu.
Để đảm bảo an toàn, hãy chắc chắn để chân của bạn ra xa sau khi sử dụng.


⚠️ Thận trọng

- Trẻ em không được sử dụng ghế massage. Không để trẻ em hoặc vật nuôi trên thân ghế, vị trí để chân, tựa lưng hoặc tay vịn của ghế để tránh các tai nạn hoặc thương tích ngoài ý muốn.

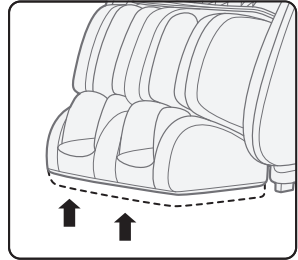


- 2** Phương pháp hạ phần massage chân:
Đảm bảo không có gì trong phần massage chân

- Từ từ gỡ chân ra khỏi phần massage chân
- Nhấn phím Nâng lưng ghế trên bộ điều khiển để đưa phần massage chân về vị trí ban đầu.

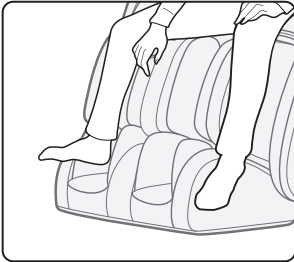


- 3** Đặt bộ điều khiển vào túi đựng trên phía bên phải của ghế massage.

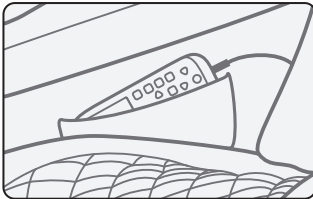


- 4** Ngắt nguồn điện

⚠️ Thận trọng

- Mỗi khi bạn sử dụng xong, hãy trượt công tắc nguồn sang vị trí "o" (tắt) và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm. Nếu không, nó có thể gây ra tai nạn hoặc thương tích do trẻ nghịch ngợm.

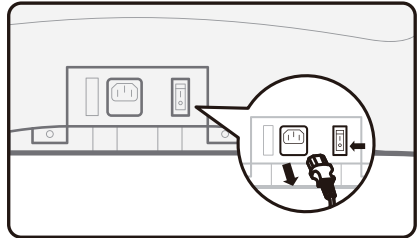


1. Tắt công tắc và rút dây nguồn ra khỏi nguồn ghế.
2. Rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện.

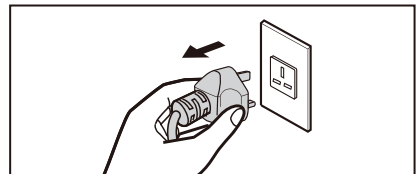

Vệ sinh và bảo quản

Làm sạch da ghế, lau sạch da ghế bằng vải khô mềm.

- Không lau sản phẩm bằng các hóa chất pha loãng như xăng và cồn.
- Khi sử dụng sản phẩm vệ sinh đồ da được bán trên thị trường, hãy làm đúng theo hướng dẫn sử dụng.
- Nếu da ghế bẩn, bạn có thể áp dụng bước dưới đây:
 - Bước 1: Ngâm một miếng vải mềm vào dung dịch chất tẩy rửa trung tính từ 3% đến 5% và nước ấm, sau đó vắt khô.
 - Bước 2: Lau bề mặt da ghế bằng vải mềm ẩm có chứa dung dịch trên.
 - Bước 3: Lau ghế massage một lần nữa bằng vải mềm khô để loại bỏ cặn bẩn
 - Bước 4: Để da ghế tự khô trong không khí một khoảng thời gian từ 15-20 phút.

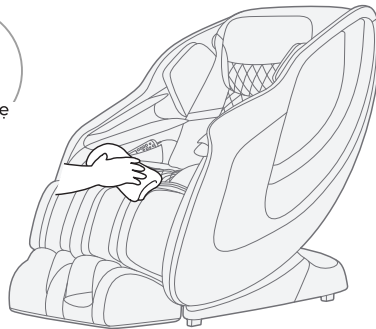


- Không làm khô bề mặt da ghế massage bằng máy sấy tóc.
- Chú ý là màu vải có thể bám lên bề mặt da ghế, hãy cẩn thận khi lau sản phẩm bằng vải denim hoặc vải màu.

Vệ sinh các phần ghế massage có chất liệu bằng nhựa thực hiện theo các bước dưới đây:

- Bước 1: Ngâm một mảnh vải mềm trong nước ấm hoặc chất tẩy rửa trung tính, vắt kiệt và lau các bộ phận ghế massage bằng nhựa một cách nhẹ nhàng. Không lau ghế massage bằng các hóa chất pha loãng như xăng và cồn.

- Bước 2: Lau các cạnh bản trên ghế bằng khăn mềm đã được ngâm trong nước sạch và vắt khô. Dùng miếng vải khô để lau bảng điều khiển.
- Bước 3: Để một khoảng thời gian trong không khí cho ghế massage được khô hoàn toàn.

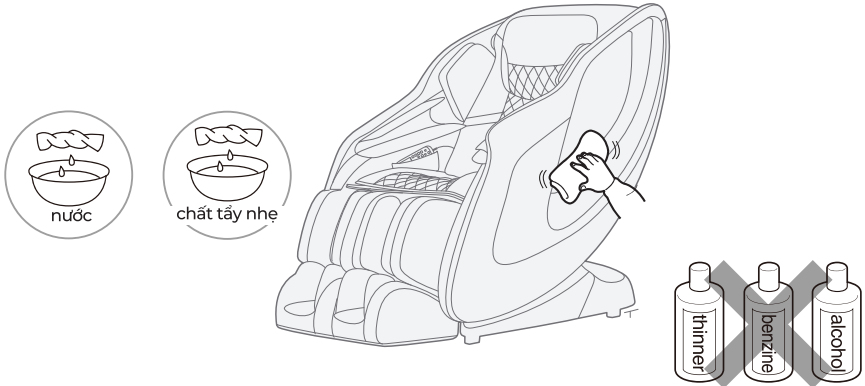

Bảo quản

- Sau khi lau sạch vết bẩn và bụi, hãy để ghế ở nơi khô ráo.
- Nếu không sử dụng trong một thời gian dài, bạn nên đặt một tấm vải phủ lên trên để tránh bụi bám bám dính.

Đảm bảo môi trường hoạt động của ghế

- Không đặt ghế massage trong môi trường ẩm ướt như phòng tắm.
- Ngừng sử dụng sản phẩm này khi nhiệt độ môi trường thay đổi bất thường.
- Không sử dụng ghế massage trong môi trường có nhiều bụi bẩn hoặc khí ăn mòn.
- Không dùng sản phẩm này trong không gian nhỏ hoặc nơi không có hệ thống thông gió tốt.
- Nhiệt độ phòng để ghế massage trong khoảng từ 0 ° C đến 35 ° C.
- Không đặt sản phẩm ghế massage OR-170 ở ngoài trời.
- Tránh ánh nắng trực tiếp.
- Để sản phẩm này cách xa mọi nguồn nhiệt như bếp nấu, cửa thoát khí của máy điều hòa.
- Không sử dụng sản phẩm khi trời có sấm sét.

Những vấn đề có thể gặp phải



Không được tháo rời, tự sửa chữa hoặc điều chỉnh ghế khi chưa có hiểu biết. Điều này có thể gây ra chập điện khiến bạn bị thương và làm hư hại sản phẩm.

Trong quá trình hoạt động của ghế massage, những âm thanh có thể phát ra liên quan đến túi khí hoặc cơ chế massage đặc biệt.

- Âm thanh của con lăn massage di chuyển lên xuống.
- Âm thanh của động cơ trong quá trình massage.
- Âm thanh ma sát của con lăn massage và áo bọc ghế (đặc biệt khi xoa bóp).
- Tiếng vỗ và xoa bóp theo hình tròn (đặc biệt khi di chuyển từ vai ra sau).
- Tốc độ massage khác nhau tạo ra mức độ âm thanh khác nhau.
- Âm thanh động cơ khi tăng tải.
- Trong chương trình tự động, âm thanh của các con lăn massage sẽ tự động điều chỉnh để phù hợp với hình dáng cơ thể của người dùng.
- Âm thanh trong quá trình xoa bóp bằng túi khí.
- Tiếng ma sát từ phần lưng và thành ghế khi nâng ghế ngả phía sau.
- Con lăn massage bên trái và bên phải có độ cao khác nhau sẽ có âm thanh ở mức độ khác nhau.

Bảo trì và bảo hành

Bảo trì

Nếu bạn không sử dụng ghế massage trong khoảng thời gian dài, hãy thực hiện bảo trì trước khi sử dụng

Bạn có thể tiến hành kiểm tra xem có xuất hiện các hiện tượng bất thường ở ghế hay không:

- Có mùi lạ, mùi khét
- Âm thanh bất thường phát ra
- Dây nguồn và phích cắm nóng bất thường
- Ghế massage dừng hoạt động bất ngờ
- Các hiện tượng bất thường khác



Để tránh sự cố hoặc tai nạn có thể xảy ra, bạn hãy tắt nguồn và rút phích cắm sau đó gọi nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra sửa chữa

Bảo hành

• Sản phẩm được bảo hành 5 năm.

• Sản phẩm được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo kiểm tra chất lượng trước khi đến tay người tiêu dùng.

Điều kiện bảo hành

- Sản phẩm sẽ được trung tâm bảo hành của Oreni sửa chữa miễn phí, nếu hư hỏng được xác định do lỗi của nhà sản xuất.
- Trung tâm bảo hành không nhận sửa chữa qua các đại lý, trừ trường hợp đại lý đã thỏa thuận ủy quyền trực tiếp với công ty. Khách hàng liên hệ trực tiếp với trung tâm bảo hành của công ty.
- Khi khách hàng mang sản phẩm đi bảo hành lưu ý nhớ mang theo phiếu bảo hành kèm theo.

Những trường hợp sau đây sẽ không được bảo hành:

1. Phiếu bảo hành không được điền đầy đủ những thông tin theo quy định.
2. Số seri trên sản phẩm, trên phiếu bảo hành không giống nhau, bị tẩy xóa hoặc sửa chữa.
3. Tự ý tháo gỡ, thay đổi cấu trúc sản phẩm, sửa chữa tại những nơi không phải do Oreni ủy quyền.
4. Có dấu hiệu cháy, khét, có dấu hiệu côn trùng hay chuột phá hại.
5. Các sự cố hư hỏng, rách nát phần da và nhựa bị mòn xước trong quá trình sử dụng.
6. Các lỗi do va chạm, gây vỡ trong quá trình sử dụng, vận chuyển và lắp đặt.
7. Các hư hỏng do:
 - Vận chuyển, sản phẩm sử dụng không đúng theo hướng dẫn.
 - Vết trầy xước, bẩn, rỉ sét, vết mòn do điều kiện bảo quản, sử dụng.
 - Các tai nạn khách quan: hỏa hoạn, lũ lụt, sét đánh...
 - Các bộ phận bên ngoài: vỏ thùng, vỏ hộp, vỏ sản phẩm...
 - Các phụ kiện tiêu hao: adaptor, bóng đèn, thẻ nhớ, tai nghe,... các sản phẩm khuyến mại nếu có.

Trường hợp được bảo hành:

1. Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật, dẫn đến không sử dụng được.
2. Lỗi do hư hỏng của chính linh kiện do trong quá trình sử dụng bình thường, đúng thiết kế của nhà sản xuất.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Tên sản phẩm	Ghế massage không trọng lực
Mẫu sản phẩm	OR-170
Điện áp định mức	220V-240V~
Tần số định mức	50Hz-60Hz
Công suất định mức	70W
Thời gian tiêu chuẩn	15 phút
Kích thước ghế (Dài x rộng x cao)	Đứng: 1500×750×1120mm
	Nằm: 1680×750×910mm
Trọng lượng	Đóng thùng: 88Kg
	Ghế: 75.8Kg
Chiều dài dây	Dây điều khiển: 600mm
	Dây nguồn: 1800mm
Môi trường sử dụng	Nhiệt độ môi trường: 0°C~35°C
	Độ ẩm môi trường: 20%~80%
Điều kiện bảo quản	Nhiệt độ bảo quản: -5°C~35°C
	Độ ẩm bảo quản: 20%~80%
Các tính năng an toàn	Được trang bị kèm theo bộ nguồn hiện đại nhất
Tải trọng tối đa	100kg

Đối với những người dùng nặng hơn 100kg, sản phẩm có thể phát ra những tiếng ồn lớn và các bộ phận bằng vải sẽ bị mòn nhanh hơn.



Công ty TNHH ORENI Việt Nam

Địa chỉ: 208D Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 1800 1238

Email: info@oreni.vn

Website: www.oreni.vn